



INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Conjunto para CIFOPLASTIA Estéril é um produto estéril. É utilizado no procedimento de cifoplastia por balão, o qual é realizado para tratar ou estabilizar fraturas, recuperar a altura, e reduzir deformidades devido à compressão do corpo vertebral.

Os instrumentos desse conjunto permitem acesso, formando passagem e cavidade para a recuperação do corpo vertebral. Se necessário, é possível também realizar a biópsia vertebral com os componentes desse conjunto.

O produto é de USO ÚNICO e todos os componentes devem ser descartados após o uso. A utilização do produto depende da técnica do profissional médico e dos protocolos estabelecidos. O uso do Conjunto para CIFOPLASTIA Estéril, permite: a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo; a realização do procedimento de cifoplastia com melhor qualidade e precisão; a realização da biópsia vertebral durante o procedimento, caso necessário; e fácil manipulação dos instrumentais.

CIFOPLASTIA

CONJUNTO PARA
CIFOPLASTIA ESTÉRIL



ATENÇÃO: NÃO acompanham esse produto: nenhum material implantável, cimento ósseo ou material de contraste.

Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

As apresentações comerciais se diferem exclusivamente pelo comprimento do Balão para CIFOPLASTIA

Modelo/Conteúdo:

Código: 32003000010 - Modelo: MI-32003-10

Código: 32003000015 - Modelo: MI-32003-15

Código: 32003000020 - Modelo: MI-32003-20

Componentes e quantidades:

- 02: Fio Guia 1.5 x 220 mm;
- 02: Broca para Acesso Vertebral com Cabo em Polímero;
- 06: Cânula Aplicadora de Cimento Ósseo com Cabo em Polímero;
- 02: Cânula Expansora de Trabalho com Cabo em Polímero;
- 02: Cânula Iniciadora de Acesso Percutâneo com Cabo em Polímero;
- 01: Cânula Extratora Menor com Ponta Retrátil e Cabo em Polímero;
- 03: Injetor de 10 ml em Polímero com Conector Luer Lock;
- 01: Injetor de 20 ml em Polímero com Conector Luer Lock;
- 01: Cuba em Polímero;
- 01: Espátula em Polímero;
- 02: Conector 3 vias Luer Lock;
- 02: Insuflador de Balão para CIFOPLASTIA;
- 02: Balão para CIFOPLASTIA: 10 mm; 15mm o 20mm.

ESTERILIZAÇÃO

O conjunto CIFOPLASTIA é um produto estéril e de uso único.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 03 (três) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Produto de Uso Único. Produto descartável.



Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br