





INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Kit Cânulas para Nervo Trigêmeo - FACEBALLOON, foi fabricado pela Microdent, é um produto médico, não ativo, invasivo cirurgicamente e de uso transitório (menos de 60 minutos), cujos componentes são estéreis e de uso único (descartáveis) para serem utilizados no procedimento de compressão do nervo trigêmeo.

O procedimento consiste em acessar o nervo trigêmeo com a(s) cânula(s) e mandril(is) e, através do balão inflável, comprimir temporariamente o nervo. A escolha de qual(is) cânula(s) e mandril(is) utilizar, é de responsabilidade do profissional médico envolvido no procedimento. Se necessário, pode-se realizar também a punção do nervo durante o processo.

O produto permite a realização de um procedimento cirúrgico, minimamente invasivo, e com fácil manipulação das cânulas, mandris e cateter balão, o que concede segurança ao procedimento cirúrgico.

FACEBALLOON KIT CÂNULAS PARA NERVO TRIGÊMEO

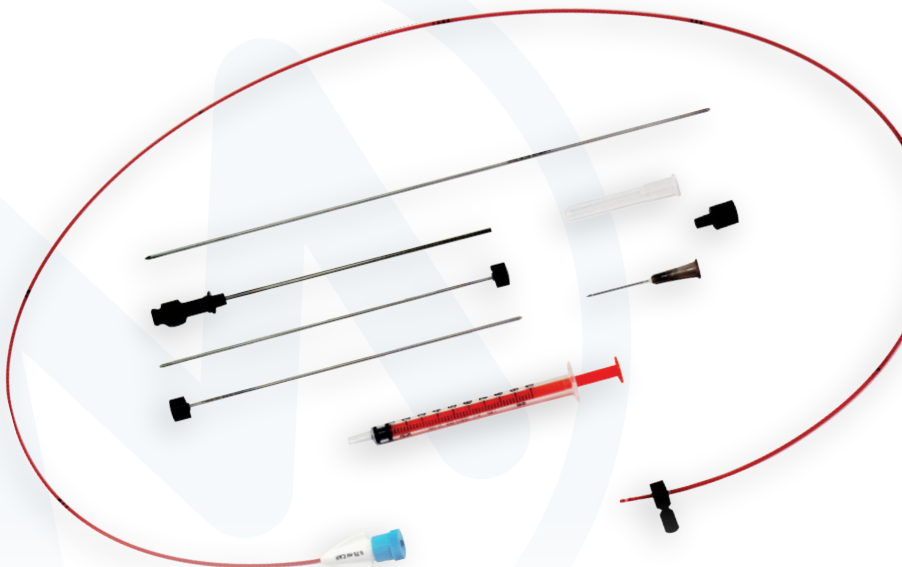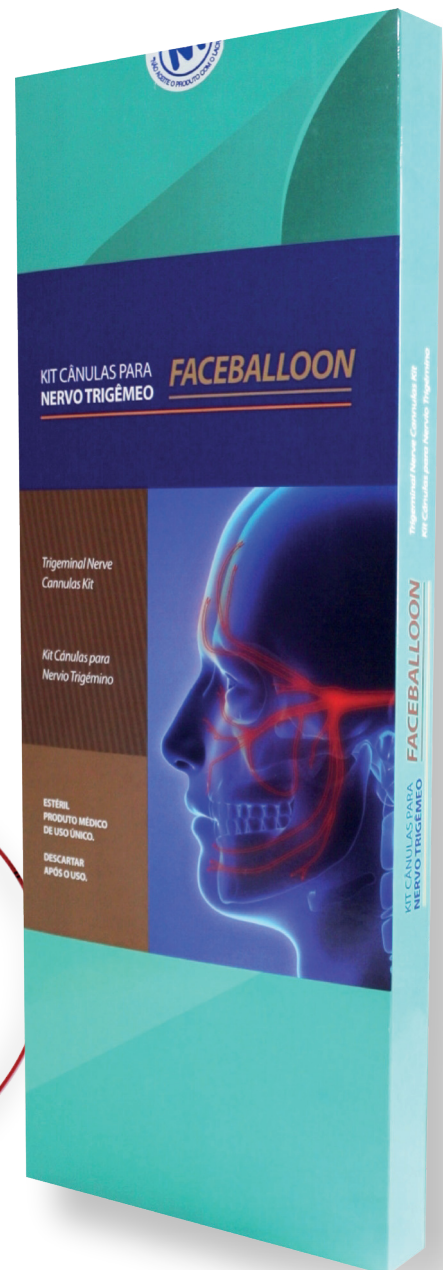

Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 32009000001 - Modelo: FACEBALLOON
- MI-32009-1**

- 01: Mandril Ø1.5 mm com Ponta Facetada;
- 01: Mandril Ø1.5 mm com Ponta Redonda;
- 01: Cânula Guia Ø2.1 mm para Mandril;
- 01: Botão para Fio Punção Ø1.5 mm;
- 01: Fio Punção Ø1.5 mm;
- 01: Bucha Limitadora com Trava;
- 01: Injetor de 01 ml com Conexão Luer Slip;
- 01: Agulha 22G 1" (0.70 x 25 mm) com Conexão Luer Slip;
- 01: Cateter Balão 9 x 800 mm para Trigêmeo;



ESTERILIZAÇÃO

O kit FACEBALLOON é um produto estéril e de uso único. O fabricante recomenda o uso único de todos os componentes.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Produto de Uso Único. Produto descartável.

