



## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Kit Cânulas de Estimulação e Bloqueio - TOTAL BLOCK é um produto estéril, de uso único, destinado ao apoio em procedimento de estimulação percutânea elétrica e bloqueio de nervos periféricos.

ATENÇÃO: NÃO acompanham esse produto: nenhum material implantável, medicamento ou fármaco.

## TOTAL BLOCK

KIT CÂNULAS DE ESTIMULAÇÃO E BLOQUEIO



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 32005000003 - Modelo: TOTAL BLOCK SS-32005-3**

- 02un: Cânula Curta de Estimulação e Bloqueio Ø0.70 x 50mm;

**Código: 32005000004 - Modelo: TOTAL BLOCK MM-32005-4**

- 02un: Cânula Média de Estimulação e Bloqueio Ø0.80 x 100mm;

**Código: 32005000005 - Modelo: TOTAL BLOCK LL-32005-5**

- 02un: Cânula Longa de Estimulação e Bloqueio Ø0.90 x 150mm;

**Código: 32005000006 - Modelo: TOTAL BLOCK SM-32005-6**

- 01un: Cânula Curta de Estimulação e Bloqueio Ø0.70 x 50mm;

- 01un: Cânula Média de Estimulação e Bloqueio Ø0.80 x 100mm;

**Código: 32005000007 - Modelo: TOTAL BLOCK SL-32005-7**

- 01un: Cânula Curta de Estimulação e Bloqueio Ø0.70 x 50mm;

- 01un: Cânula Longa de Estimulação e Bloqueio Ø0.90 x 150mm;

**Código: 32005000008 - Modelo: TOTAL BLOCK ML-32005-8**

- 01un: Cânula Média de Estimulação e Bloqueio Ø0.80 x 100mm;

- 01un: Cânula Longa de Estimulação e Bloqueio Ø0.90 x 150mm;

## ESTERILIZAÇÃO

O produto é estéril e o fabricante recomenda o uso único de todos os componentes

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

