

INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O conjunto de cânulas foi desenvolvido para auxiliar o cirurgião no procedimento de bloqueio de dores crônicas que se originam do desgaste ou inflamação das articulações da coluna vertebral. O bloqueio consiste em acessar os nervos ou áreas da região vertebral em a(s) cânula(s) mais adequada(s) e aplicar medicações analgésicas, anestésicas ou anti-inflamatórias no local. A escolha de qual(is) cânula(s) utilizar, é de responsabilidade do profissional médico envolvido no procedimento.

O objetivo do procedimento é o alívio temporário dos sintomas, embora, em alguns casos, esse alívio possa ser bastante duradouro. O produto permite a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo com fácil manipulação das cânulas, o que concede segurança ao procedimento cirúrgico.

ATENÇÃO: NÃO acompanham esse produto: nenhum material implantável, medicamento ou fármaco.

MICROBLOCK

KIT CÂNULAS DE BLOQUEIO
PARA COLUNA VERTEBRAL



Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br


APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

Código: 32005000001 - Modelo: MI-32005-1 - MICROBLOCK

- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 1.2x90mm;
- 04: Cânula MICROBLOCK Descartável - 0.7x90mm;
- 04: Cânula MICROBLOCK Descartável - 0.6x90mm;
- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 1.2x180mm;
- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 1.2x200mm;
- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 0.7x200mm.

ESTERILIZAÇÃO

O kit MICRO BLOCK é um produto estéril e de uso único.
O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).
Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.
Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.
Produto de Uso Único. Produto descartável.

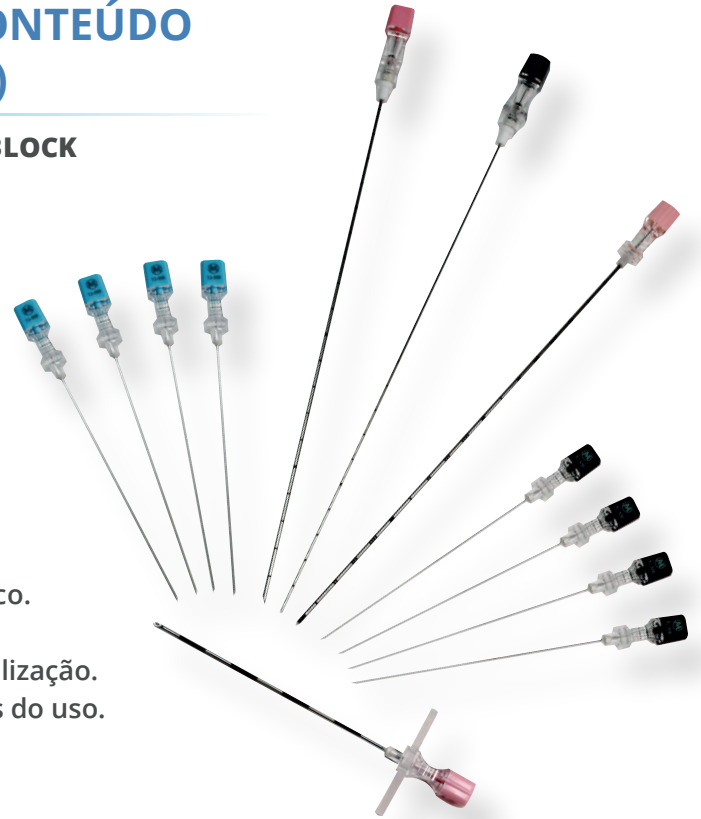

Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br