



INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE


O Conjunto para Biópsia Cerebral BIOPSNEURO é um produto estéril, utilizado no procedimento de biópsia cerebral para a obtenção de material para cultura e análise tecidual.

O produto é de USO ÚNICO e todos os componentes devem ser descartados após o uso. A utilização do produto depende da técnica do profissional médico e dos protocolos estabelecidos.

O uso do Conjunto para Biópsia Cerebral BIOPSNEURO, permite: a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo; a coleta de mais material com melhor qualidade ao patologista; fácil manipulação dos instrumentais.

ATENÇÃO: NÃO acompanham esse produto: nenhum material implantável.

BIOPSNEURO CONJUNTO PARA BIÓPSIA CEREBRAL

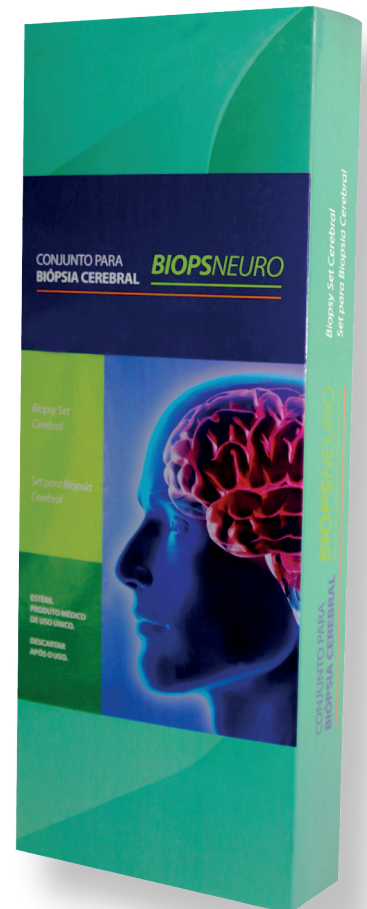

Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADE - COMPONENTES)

- Código: 32002000005 - Modelo: MI-32002-5
Cânula de Trabalho BIOPSNEURO com Janela de 5 mm;
 - Código: 32002000008 - Modelo: MI-32002-8
Cânula de Trabalho BIOPSNEURO com Janela de 8 mm;
 - Código: 32002000010 - Modelo: MI-32002-10
Cânula de Trabalho BIOPSNEURO com Janela de 10 mm.
-
- 01: Cânula de Trabalho BIOPSNEURO com Janela de 5 mm, 8 mm ou 10 mm;
 - 01: Cânula de Corte BIOPSNEURO com Janela de 5 mm, 8 mm ou 10 mm;
 - 01: Suporte Maior;
 - 01: Suporte Menor;
 - 02: Bucha Guia Menor;
 - 01: Bucha Guia Maior com Trava;
 - 01: Parafuso Estereotáxico Pequeno;
 - 04: Parafusos Estereotáxico Médio;
 - 04: Parafusos Estereotáxico Grande;
 - 01: Injetor de 05 ml em Polímero com Conector Luer Lock;
 - 01: Prolongador com Conexão Luer Lock.



ESTERILIZAÇÃO

O conjunto BIOPSNEURO é um produto estéril e de uso único.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Produto de Uso Único. Produto descartável.

