



## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE


O Conjunto para Biópsia Cerebral BIOPSNEURO é um produto estéril, utilizado no procedimento de biópsia cerebral para a obtenção de material para cultura e análise tecidual.

O produto é de USO ÚNICO e todos os componentes devem ser descartados após o uso. A utilização do produto depende da técnica do profissional médico e dos protocolos estabelecidos.

O uso do Conjunto para Biópsia Cerebral BIOPSNEURO, permite: a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo; a coleta de mais material com melhor qualidade ao patologista; fácil manipulação dos instrumentais.

**ATENÇÃO: NÃO** acompanham esse produto: nenhum material implantável.

## BIOPSNEURO CONJUNTO PARA BIÓPSIA CEREBRAL

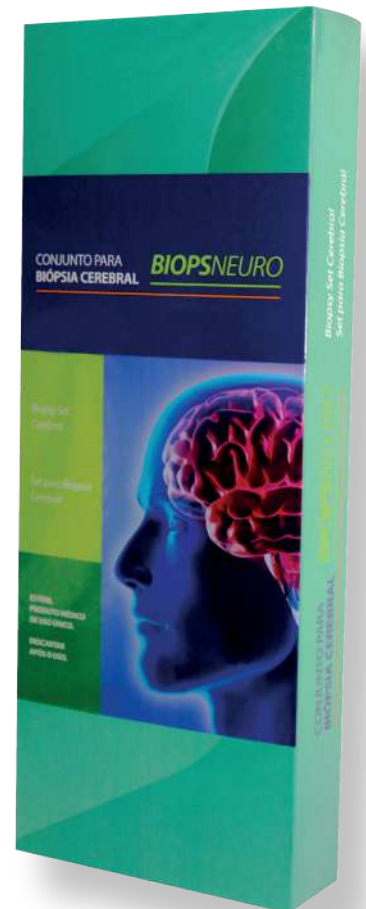

**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADE - COMPONENTES)

- Código: 32002000005 - Modelo: MI-32002-5  
Cânula de Trabalho BIOPSNEURO com Janela de 5 mm;
- Código: 32002000008 - Modelo: MI-32002-8  
Cânula de Trabalho BIOPSNEURO com Janela de 8 mm;
- Código: 32002000010 - Modelo: MI-32002-10  
Cânula de Trabalho BIOPSNEURO com Janela de 10 mm.

- 01: Cânula de Trabalho BIOPSNEURO com Janela de 5 mm, 8 mm ou 10 mm;
- 01: Cânula de Corte BIOPSNEURO com Janela de 5 mm, 8 mm ou 10 mm;
- 01: Suporte Maior;
- 01: Suporte Menor;
- 02: Bucha Guia Menor;
- 01: Bucha Guia Maior com Trava;
- 01: Parafuso Estereotáxico Pequeno;
- 04: Parafusos Estereotáxico Médio;
- 04: Parafusos Estereotáxico Grande;
- 01: Injetor de 05 ml em Polímero com Conector Luer Lock;
- 01: Prolongador com Conexão Luer Lock.



## ESTERILIZAÇÃO

O conjunto BIOPSNEURO é um produto estéril e de uso único.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Produto de Uso Único. Produto descartável.





## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O conjunto de cânulas foi desenvolvido para auxiliar o cirurgião no procedimento de bloqueio de dores crônicas que se originam do desgaste ou inflamação das articulações da coluna vertebral. O bloqueio consiste em acessar os nervos ou áreas da região vertebral em a(s) cânula(s) mais adequada(s) e aplicar medicações analgésicas, anestésicas ou anti-inflamatórias no local. A escolha de qual(is) cânula(s) utilizar, é de responsabilidade do profissional médico envolvido no procedimento.

O objetivo do procedimento é o alívio temporário dos sintomas, embora, em alguns casos, esse alívio possa ser bastante duradouro. O produto permite a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo com fácil manipulação das cânulas, o que concede segurança ao procedimento cirúrgico.

**ATENÇÃO:** NÃO acompanham esse produto: nenhum material implantável, medicamento ou fármaco.

## MICROBLOCK

KIT CÂNULAS DE BLOQUEIO  
PARA COLUNA VERTEBRAL



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br


## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 32005000001 - Modelo: MI-32005-1 - MICROBLOCK**

- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 1.2x90mm;
- 04: Cânula MICROBLOCK Descartável - 0.7x90mm;
- 04: Cânula MICROBLOCK Descartável - 0.6x90mm;
- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 1.2x180mm;
- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 1.2x200mm;
- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 0.7x200mm.

## ESTERILIZAÇÃO

O kit MICRO BLOCK é um produto estéril e de uso único.  
O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).  
Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.  
Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.  
Produto de Uso Único. Produto descartável.

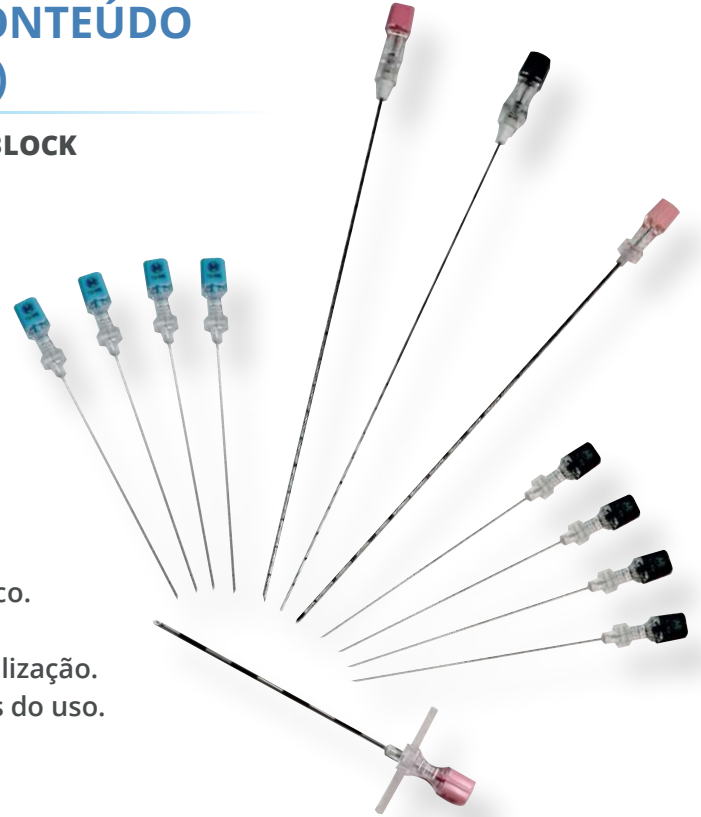

**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



## MICROBLOCK FIT

KIT CÂNULAS DE BLOQUEIO  
PARA COLUNA VERTEBRAL



## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O conjunto de cânulas foi desenvolvido para auxiliar o cirurgião no procedimento de bloqueio de dores crônicas que se originam do desgaste ou inflamação das articulações da coluna vertebral.

O bloqueio consiste em acessar os nervos ou áreas da região vertebral em a(s) cânula(s) mais adequada(s) e aplicar medicações analgésicas, anestésicas ou anti-inflamatórias no local. A escolha de qual(is) cânula(s) utilizar, é de responsabilidade do profissional médico envolvido no procedimento.

O objetivo do procedimento é o alívio temporário dos sintomas, embora, em alguns casos, esse alívio possa ser bastante duradouro. O produto permite a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo com fácil manipulação das cânulas, o que concede segurança ao procedimento cirúrgico.

**ATENÇÃO:** NÃO acompanham esse produto: nenhum material implantável, medicamento ou fármaco.



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 32005000002 - Modelo: MI-32005-2 -  
MICROBLOCK FIT**

- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 1.2x90mm;
- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 0.7x90mm;
- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 0.6x90mm;
- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 1.2x180mm;
- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 1.2x200mm;
- 01: Cânula MICROBLOCK Descartável - 0.7x200mm.

## ESTERILIZAÇÃO

O kit MICRO BLOCK FIT é um produto estéril e de uso único.  
O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).  
Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.  
Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.  
Produto de Uso Único. Produto descartável.



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Kit Cânulas de Estimulação e Bloqueio - TOTAL BLOCK é um produto estéril, de uso único, destinado ao apoio em procedimento de estimulação percutânea elétrica e bloqueio de nervos periféricos.

ATENÇÃO: NÃO acompanham esse produto: nenhum material implantável, medicamento ou fármaco.

## TOTAL BLOCK

KIT CÂNULAS DE ESTIMULAÇÃO E BLOQUEIO



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 32005000003 - Modelo: TOTAL BLOCK SS-32005-3**

- 02un: Cânula Curta de Estimulação e Bloqueio Ø0.70 x 50mm;

**Código: 32005000004 - Modelo: TOTAL BLOCK MM-32005-4**

- 02un: Cânula Média de Estimulação e Bloqueio Ø0.80 x 100mm;

**Código: 32005000005 - Modelo: TOTAL BLOCK LL-32005-5**

- 02un: Cânula Longa de Estimulação e Bloqueio Ø0.90 x 150mm;

**Código: 32005000006 - Modelo: TOTAL BLOCK SM-32005-6**

- 01un: Cânula Curta de Estimulação e Bloqueio Ø0.70 x 50mm;

- 01un: Cânula Média de Estimulação e Bloqueio Ø0.80 x 100mm;

**Código: 32005000007 - Modelo: TOTAL BLOCK SL-32005-7**

- 01un: Cânula Curta de Estimulação e Bloqueio Ø0.70 x 50mm;

- 01un: Cânula Longa de Estimulação e Bloqueio Ø0.90 x 150mm;

**Código: 32005000008 - Modelo: TOTAL BLOCK ML-32005-8**

- 01un: Cânula Média de Estimulação e Bloqueio Ø0.80 x 100mm;

- 01un: Cânula Longa de Estimulação e Bloqueio Ø0.90 x 150mm;


## ESTERILIZAÇÃO

O produto é estéril e o fabricante recomenda o uso único de todos os componentes

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

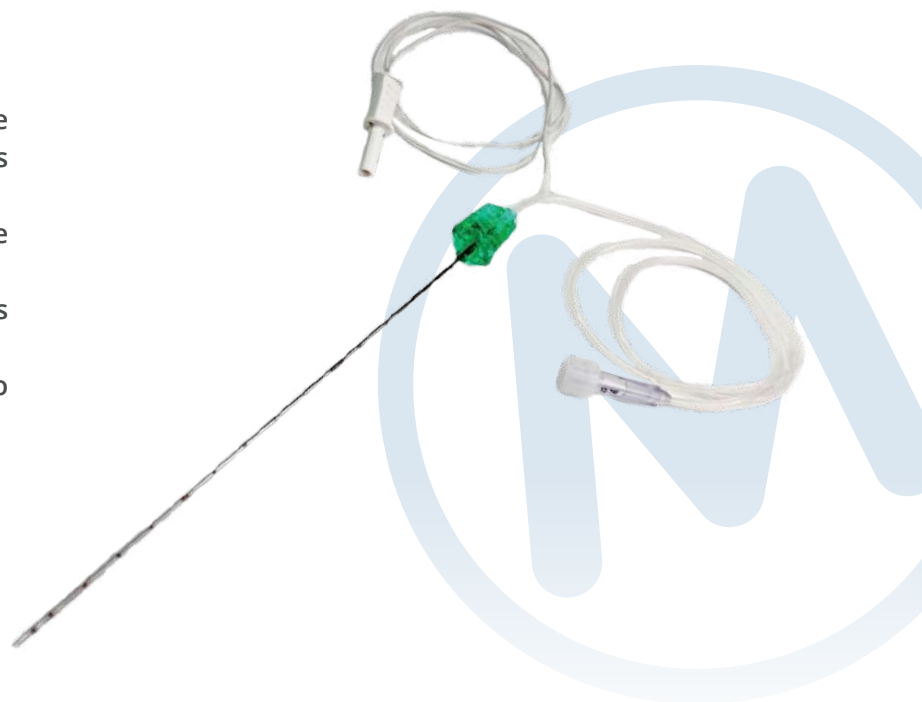




## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE


O Kit Cânulas para Nervo Trigêmeo - FACEBALLOON, foi fabricado pela Microdent, é um produto médico, não ativo, invasivo cirurgicamente e de uso transitório (menos de 60 minutos), cujos componentes são estéreis e de uso único (descartáveis) para serem utilizados no procedimento de compressão do nervo trigêmeo.

O procedimento consiste em acessar o nervo trigêmeo com a(s) cânula(s) e mandril(is) e, através do balão inflável, comprimir temporariamente o nervo. A escolha de qual(is) cânula(s) e mandril(is) utilizar, é de responsabilidade do profissional médico envolvido no procedimento. Se necessário, pode-se realizar também a punção do nervo durante o processo.

O produto permite a realização de um procedimento cirúrgico, minimamente invasivo, e com fácil manipulação das cânulas, mandris e cateter balão, o que concede segurança ao procedimento cirúrgico.

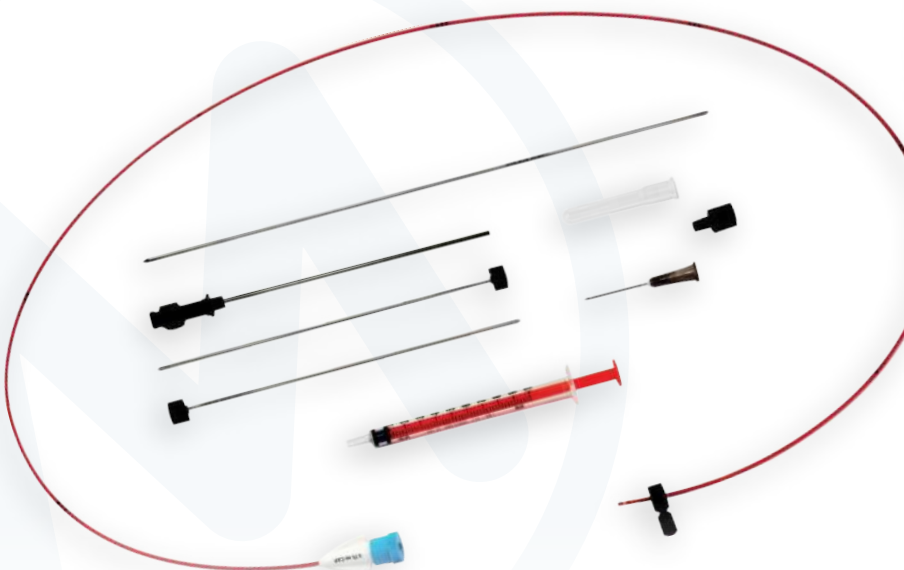

## FACEBALLOON KIT CÂNULAS PARA NERVO TRIGÊMEO

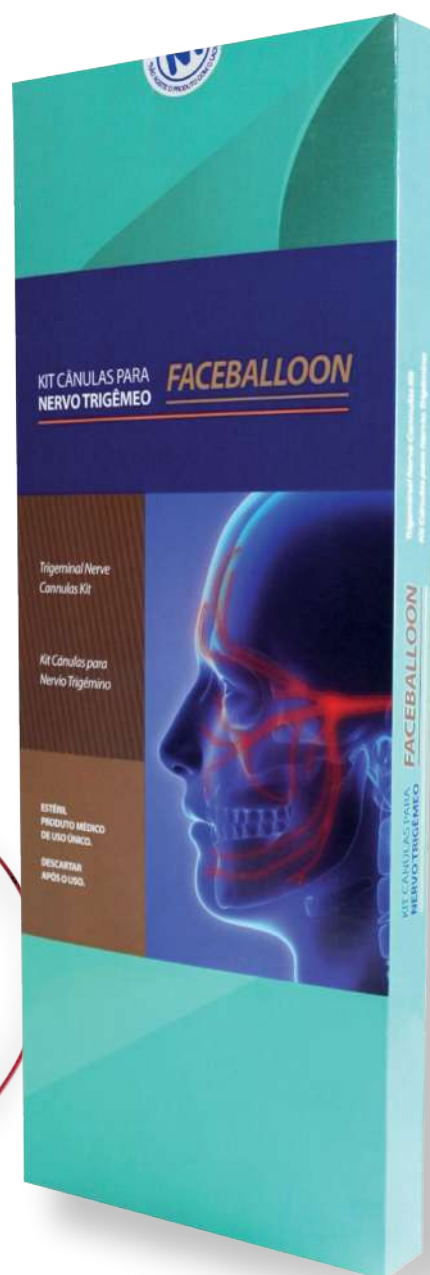

**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 32009000001 - Modelo: FACEBALLOON  
- MI-32009-1**

- 01: Mandril Ø1.5 mm com Ponta Facetada;
- 01: Mandril Ø1.5 mm com Ponta Redonda;
- 01: Cânula Guia Ø2.1 mm para Mandril;
- 01: Botão para Fio Punção Ø1.5 mm;
- 01: Fio Punção Ø1.5 mm;
- 01: Bucha Limitadora com Trava;
- 01: Injetor de 01 ml com Conexão Luer Slip;
- 01: Agulha 22G 1" (0.70 x 25 mm) com Conexão Luer Slip;
- 01: Cateter Balão 9 x 800 mm para Trigêmeo;



## ESTERILIZAÇÃO

O kit FACEBALLOON é um produto estéril e de uso único. O fabricante recomenda o uso único de todos os componentes.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Produto de Uso Único. Produto descartável.



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br




## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

A Pinça Bipolar - DISSECT MAXX foi desenvolvida para uso em conjunto com geradores cirúrgicos em procedimentos de coagulação, dissecação, corte e fulguração eletrocirúrgicas.

As pinças são conectadas aos geradores cirúrgicos através de cabos com conectores, e quando há o fechamento de suas pontas, uma corrente circula entre um eletrodo ativo e outro de dispersão (retorno), elevando a temperatura do tecido para realizar funções como vaporização (corte), fulguração (coagulação) e dissecação (secagem térmica).

## DISSECT MAXX PINÇA BIPOLAR

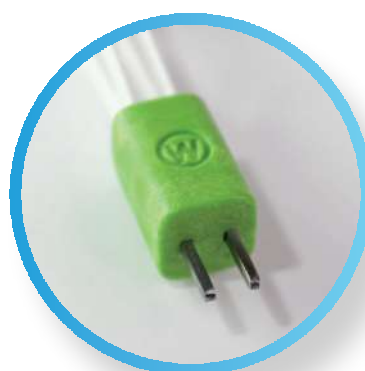

**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

### DISSECT MAXX - BAIONETA - PONTA RETA - C/ CABO

#### OPÇÕES:

- Comprimento: 16cm, 18cm, 20cm, 22cm;
- Ponta: 0,4mm, 0,7mm, 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm.


## ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de Validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

O Fabricante Recomenda Uso Único. Produto descartável.

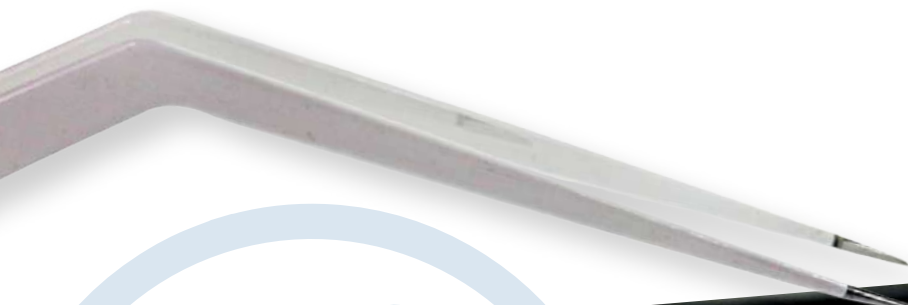

**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Kit Cânula para Discografia - SAFE DISC é um produto estéril e de uso único. É destinado ao apoio em procedimento para detecção de doenças degenerativas e danos estruturais nos discos intervertebrais da coluna vertebral.

## SAFE DISC

KIT CÂNULA  
PARA DISCOGRAFIA



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

### **Código: 32018000001 - Modelo: SAFE DISC - MI-32018-1**

- 02: Cânula SAFE DISC Descartável - 1.2 x 200 mm;
- 01: Insuflador para Discografia;
- 01: 02045000005 - Conector 03 vias Luer Lock para Insuflador.

### **Código: 32018000002 - Modelo: SAFE DISC - MI-32018-2**

- 02: Cânula SAFE DISC Descartável - 1.2 x 180 mm;
- 01: Insuflador para Discografia;
- 01: Conector 03 vias Luer Lock para Insuflador

### **Código: 32018000003 - Modelo: SAFE DISC - MI-32018-3**

- 02: Cânula SAFE DISC Descartável - 1.2 x 150 mm;
- 01: Insuflador para Discografia;
- 01: Conector 03 vias Luer Lock para Insuflador

## ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).  
Prazo de validade: 03 (três) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Produto de Uso Único. Produto descartável.





## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Conjunto para CIFOPLASTIA Estéril é um produto estéril. É utilizado no procedimento de cifoplastia por balão, o qual é realizado para tratar ou estabilizar fraturas, recuperar a altura, e reduzir deformidades devido à compressão do corpo vertebral.

Os instrumentos desse conjunto permitem acesso, formando passagem e cavidade para a recuperação do corpo vertebral. Se necessário, é possível também realizar a biópsia vertebral com os componentes desse conjunto.

O produto é de USO ÚNICO e todos os componentes devem ser descartados após o uso. A utilização do produto depende da técnica do profissional médico e dos protocolos estabelecidos. O uso do Conjunto para CIFOPLASTIA Estéril, permite: a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo; a realização do procedimento de cifoplastia com melhor qualidade e precisão; a realização da biópsia vertebral durante o procedimento, caso necessário; e fácil manipulação dos instrumentais.

## CIFOPLASTIA

CONJUNTO PARA  
CIFOPLASTIA ESTÉRIL



ATENÇÃO: NÃO acompanham esse produto: nenhum material implantável, cimento ósseo ou material de contraste.

**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

*As apresentações comerciais se diferem exclusivamente pelo comprimento do Balão para CIFOPLASTIA*

### Modelo/Conteúdo:

**Código: 32003000010 - Modelo: MI-32003-10**

**Código: 32003000015 - Modelo: MI-32003-15**

**Código: 32003000020 - Modelo: MI-32003-20**

### Componentes e quantidades:

- 02: Fio Guia 1.5 x 220 mm;
- 02: Broca para Acesso Vertebral com Cabo em Polímero;
- 06: Cânula Aplicadora de Cimento Ósseo com Cabo em Polímero;
- 02: Cânula Expansora de Trabalho com Cabo em Polímero;
- 02: Cânula Iniciadora de Acesso Percutâneo com Cabo em Polímero;
- 01: Cânula Extratora Menor com Ponta Retrátil e Cabo em Polímero;
- 03: Injetor de 10 ml em Polímero com Conector Luer Lock;
- 01: Injetor de 20 ml em Polímero com Conector Luer Lock;
- 01: Cuba em Polímero;
- 01: Espátula em Polímero;
- 02: Conector 3 vias Luer Lock;
- 02: Insuflador de Balão para CIFOPLASTIA;
- 02: Balão para CIFOPLASTIA: 10 mm; 15mm o 20mm.

## ESTERILIZAÇÃO

O conjunto CIFOPLASTIA é um produto estéril e de uso único.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 03 (três) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Produto de Uso Único. Produto descartável.



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



**Microdent**  
Aparelhos Médicos e Odontológicos

microdent  
.ind  
.br



## BIOPSVERTY



CONJUNTO PARA BIÓPSIA  
VERTEBRAL COM PINÇA NICOLA

## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Sistema/Conjunto para Biópsia Vertebral BIOPSVERTY é um produto estéril, utilizado no procedimento de biópsia vertebral para obtenção de material para cultura e análise

tecidual. O produto é de USO ÚNICO e todos os componentes devem ser descartados após o uso. A utilização do produto depende da técnica do profissional médico e dos protocolos estabelecidos.

O uso do Sistema/Conjunto para Biópsia Vertebral BIOPSVERTY permite: a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo; a coleta de mais material com melhor qualidade ao patologista; a coleta de material esponjoso, cortical e discal; fácil manipulação dos instrumentais.

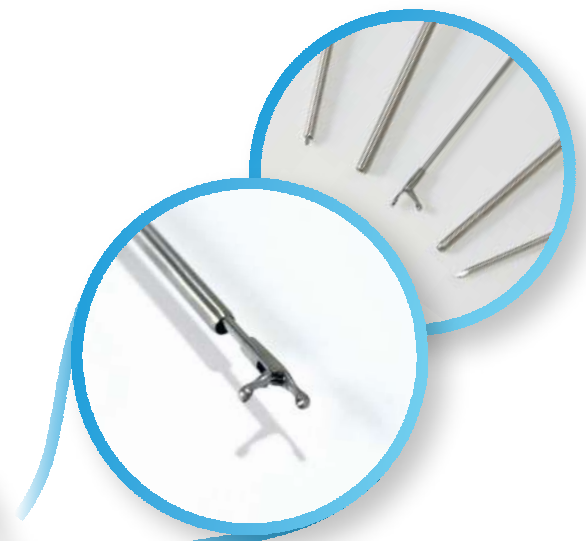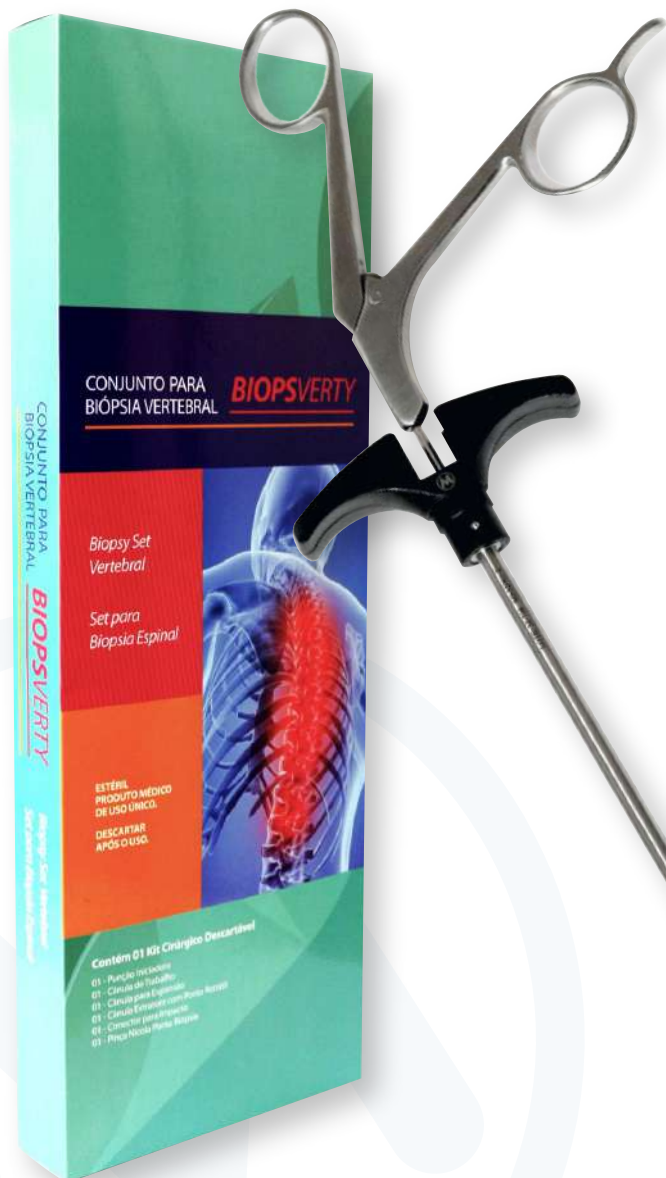

**ATENÇÃO: NÃO** acompanham esse produto: nenhum material implantável.

**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 32001000004 - Modelo: MI-32001-4**

- 01: Punção Iniciadora com Cabo em Polímero;
- 01: Cânula de Trabalho com Cabo em Polímero;
- 01: Cânula para Expansão com Cabo em Polímero;
- 01: Cânula Extratora com Ponta Retrátil e Cabo em Polímero;
- 01: Conector para Impacto;
- 01: Pinça Nicola Ponta Biópsia 185 x 3 mm;

## ESTERILIZAÇÃO

O Sistema/Conjunto para Biópsia Vertebral BIOPSVERTY é um produto estéril e de uso único.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Produto de Uso Único. Produto descartável.



## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Conjunto para Vertebroplastia - VERTYFIX é um produto estéril. É um kit composto por instrumentais utilizados para auxiliar no procedimento cirúrgico, minimamente invasivo, denominado de vertebroplastia, o qual é realizado para tratar fraturas na coluna vertebral, melhorando a dor e a capacidade funcional dos pacientes.

A vertebroplastia é indicada em geral para pessoas que sofreram uma fratura em decorrência da compressão óssea. É comum em pessoas com osteoporose e neoplasias de coluna, mas pode ser indicada para pessoas que sofreram um trauma agudo em decorrência, por exemplo, de: tumores; fraturas da coluna vertebral; fraturas de compressão; fraturas osteoporóticas por compressão; metástase vertebral dolorosa, com ou sem terapia adjuvante; osteonecrose vertebral; reforço de corpo vertebral após cirurgia de estabilização; e hemangioma vertebral doloroso.

Os instrumentos desse conjunto permitem acesso, formando passagem e cavidade para a injeção de cimento ósseo no interior da vértebra.

## VERTYFIX

CONJUNTO PARA  
VERTEBROPLASTIA



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

O produto é de USO ÚNICO e todos os componentes devem ser descartados após o uso. A utilização do produto depende da técnica do profissional médico e dos protocolos estabelecidos.

O uso do Conjunto para Vertebroplastia - VERTYFIX, permite: a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo; a realização do procedimento de vertebroplastia com melhor qualidade e precisão; fácil manipulação dos instrumentais.

ESTE PRODUTO NÃO é destinado para uso em biópsia/aspiração de medula. Seu uso é restrito a aplicação de cimento ósseo, no procedimento de vertebroplastia, conforme descrito nas instruções de uso.

ATENÇÃO: NÃO  
acompanham esse  
produto: nenhum  
material implantável,  
cimento ósseo ou  
material de contraste.



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 32004000150 - Modelo: VERTYFIX MI-32004-150-3**

- 01: Pistola Aplicadora de Cimento;
- 01: Cânula Ø3.0 x 150 mm para Injeção;
- 01: Fio Ø2.4 x 150 mm para Guiar e Puncionar;
- 01: Adaptador para Sucção com Conexão Luer Lock M;
- 01: Tubo Extensor com Conexão Luer Lock M-F;
- 01: Cuba em Polímero;
- 01: Espátula em Polímero.



## ESTERILIZAÇÃO

O conjunto VERTYFIX é um produto estéril e de uso único.  
O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).  
Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.  
Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.  
Produto de Uso Único. Produto descartável.




**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



## BIOPSVERTY

SISTEMA PARA BIÓPSIA VERTEBRAL

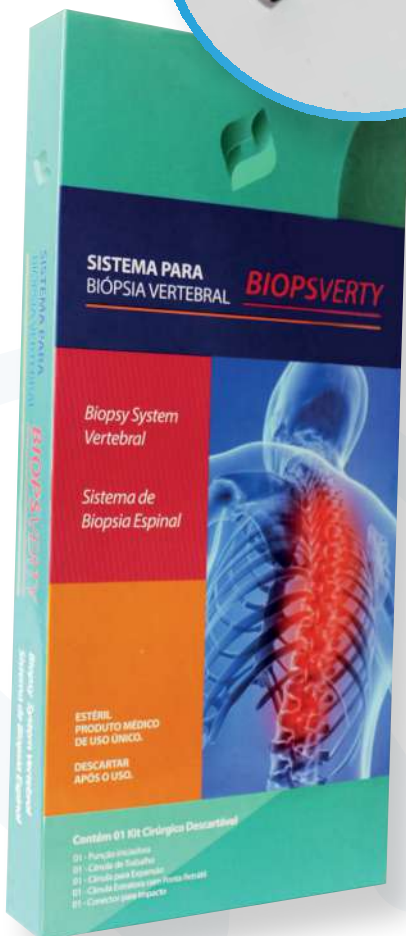

## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Sistema/Conjunto para Biópsia Vertebral BIOPSVERTY é um produto estéril, utilizado no procedimento de biópsia vertebral para obtenção de material para cultura e análise tecidual.

O produto é de USO ÚNICO e todos os componentes devem ser descartados após o uso. A utilização do produto depende da técnica do profissional médico e dos protocolos estabelecidos.

O uso do Sistema/Conjunto para Biópsia Vertebral BIOPSVERTY permite: a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo; a coleta de mais material com melhor qualidade ao patologista; a coleta de material esponjoso, cortical e discal; fácil manipulação dos instrumentais.

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 32001000002 - Modelo: MI-32001-2 - BIOPSVERTY**

- 01: Punção Iniciadora com Cabo em Polímero;
- 01: Cânula de Trabalho com Cabo em Polímero;
- 01: Cânula para Expansão com Cabo em Polímero;
- 01: Cânula Extratora com Ponta Retrátil e Cabo em Polímero;
- 01: Conector para Impacto;



### ESTERILIZAÇÃO

O Sistema/Conjunto para Biópsia Vertebral BIOPSVERTY é um produto estéril e de uso único. O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO). Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Produto de Uso Único. Produto descartável.

**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



## VERTY VISION

KIT CÂNULAS DILATADORAS



## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O VERTY VISION é um sistema de retração tubular, estéril que possibilita o acesso à coluna vertebral através de um conjunto de tubos de dilatação sequenciais. Atua como instrumental de apoio, permitindo ao cirurgião afastar tecidos na região solicitada. Seu formato e sua ponta atraumática, foram especialmente desenvolvidos para minimizar qualquer tipo de agressão em sua respectiva região de uso, promovendo acesso seguro da pele até o interior da estrutura, sem danificar músculos; tendões; ligamentos; articulações.

A utilização do produto depende da técnica do profissional medico e dos protocolos estabelecidos.

O VERTY VISION permite que o cirurgião faça uma incisão inicialmente pequena e, depois, aumente gradualmente o tamanho da abertura até o tamanho necessário para efetuar o procedimento

cirúrgico, reduzindo, desse modo, dano ao tecido e acelerando o tempo de recuperação do paciente.

**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 3201400001 - Modelo: VERTY VISION**

- 01: Punção Iniciadora;
- 01: Cânula de Dilatação Ø6 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø9,5 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø13 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø16,5 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø20 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø23,5 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø27 mm;
- 01: Dilatador Final Ø30 mm com Cabo Auxiliar para Apoio.



## ESTERILIZAÇÃO

O produto é estéril e o fabricante recomenda o uso único de todos os componentes.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



## DISSECT ONE

KIT DE INSTRUMENTAIS  
PARA MICRO CIRURGIA



## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Kit de Instrumentais para Micro Cirurgia - DISSECT ONE é um produto estéril, destinado ao apoio em procedimento de microcirurgia com a finalidade de: Corte, Afastamento, Sutura, Aspiração, Dissecção, e Exérese de tecidos moles.

A microcirurgia é uma técnica cirúrgica baseada no uso de instrumentos especiais para a manipulação de estruturas anatômicas de pequenas dimensões, na ordem de milímetros. Essa técnica aumenta muito a precisão do procedimento, possibilitando uma cirurgia minimamente invasiva e a máxima preservação da anatomia com a mínima agressão ao organismo, sendo suficiente para resolver o problema.



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

### Código: 32013000001 - Modelo: MI-32013-1 - DISSECT ONE

- 01: Micro Espátula Maleável 18 cm;
- 01: Micro Pinça Adson - Dente de Rato 12 cm;
- 01: Micro Pinça Adson - Serrilhada 12 cm;
- 01: Micro Tesoura Yasargil - Baioneta 20 cm Curva;
- 01: Micro Porta Agulha Baioneta Curvo 20 cm;
- 01: Micro Aspirador Frazier 1,5 mm;
- 01: Micro Aspirador Frazier 2,5mm;
- 01: Micro Pinça Baioneta com Dente de Rato;
- 01: Micro Pinça Baioneta sem Dente;
- 01: Micro Dissector de Rathon - Ponta Raspa;
- 01: Micro Dissector de Rathon - Ponta Cureta;
- 01: Micro Dissector de Rathon - Ponta de Lança;
- 01: Micro Dissector de Rathon - Ponta Esférica 90°.



## ESTERILIZAÇÃO

O produto é estéril e o fabricante recomenda o uso único de todos os componentes.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br