

A Microdent Aparelhos Médicos e Odontológicos, em acordo com as determinações da Instrução Normativa IN nº 04 de 2012, disponibiliza as Instruções de Uso de seus produtos em formato eletrônico para download, através do site do fabricante - endereço eletrônico: [www.microdent.ind.br](http://www.microdent.ind.br)

**IMPORTANTE:** Para correta identificação do arquivo desejado, atentar-se para a Revisão da Instrução de Uso e seu nº ANVISA informados no rótulo do produto adquirido.

Caso o usuário tenha interesse em receber as Instruções de Uso em formato impresso, estas poderão ser solicitadas, sem custo de emissão e envio, através do Serviço de Atendimento ao Consumidor: +55 (16) 3610-7666, ou pelo e-mail: [microdent@microdent.com.br](mailto:microdent@microdent.com.br)

Instrução de Uso disponível em: [www.microdent.ind.br](http://www.microdent.ind.br)

Versão: MAN.22.065

Código de Referência: 01034000104

Revisão: 01

Registro ANVISA nº: 10309310068

## INSTRUÇÕES DE USO

# LÂMINA MICRO MAX SAGITAL – SLIM 5 - ENCAIXE - DE

**PRODUTO ESTÉRIL  
O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**

MAN.22.065 - 01034000104 - REV. 01 - DEZEMBRO/2023

## **INTRODUÇÃO**

Prezado cliente, a empresa Microdent® agradece a opção pelos nossos produtos, os quais foram desenvolvidos dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetados para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança.

Este manual irá lhe fornecer detalhes importantes e gerais do produto adquirido, orientando para o uso adequado, assim como na solução de pequenos problemas que eventualmente possam ocorrer.

### **ATENÇÃO: PARA MAIOR SEGURANÇA:**

Ler atentamente todas as instruções contidas neste manual, antes do uso do produto.

**Observação:** Todos os operadores devem estar cientes das instruções contidas neste manual.

**O produto é estéril. O fabricante recomenda o USO ÚNICO.**

## **APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

Registro na ANVISA nº: 10309310068 – Classe II

Nome Técnico: Serras

Nome Comercial: Lâmina MICRO MAX

### **Modelos Comerciais**

Os diferentes modelos diferenciam-se pelas variações nos seguintes aspectos:

- Formato da lâmina (sentido de corte): Sagital, Oscilatório e Reciprocante.
- Dentes: DA (Dentes Afiados), DG (Dentes Gêmeos), DI (Dentes Inclinados), DL (Dentes Angulares), DR (Dentes Retos), DS (Dentes Stablecut), DT (Dentes Travados).
- Encaixes: DE1, DE2, DE3, DE4, DE5, DE6, DE7, DE8, DE9.
- Dimensões: comprimento de corte, largura e espessura da lâmina.

**Todas estas informações são devidamente detalhadas na rotulagem do produto.**

### **LÂMINA SAGITAL ENCAIXE DE 1 SLIM 5 - DENTE AFIADO**

33094000000 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 30 x 14 x 0.5 mm; 33094000001 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 35 x 14 x 0.5 mm; 33094000002 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 40 x 14 x 0.5 mm; 33094000003 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 45 x 14 x 0.5 mm; 33094000004 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 50 x 14 x 0.5 mm; 33094000005 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 55 x 14 x 0.5 mm; 33094000006 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 60 x 14 x 0.5 mm; 33094000007 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 65 x 14 x 0.5 mm; 33094000008 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 70 x 14 x 0.5 mm; 33094000009 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 75 x 14 x 0.5 mm; 33094000010 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 80 x 14 x 0.5 mm; 33094000011 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 85 x 14 x 0.5 mm; 33094000012 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 90 x 14 x 0.5 mm; 33094000013 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 95 x 14 x 0.5 mm; 33094000014 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 100 x 14 x 0.5 mm; 33094000015 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 105 x 14 x 0.5 mm; 33094000016 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 110 x 14 x 0.5 mm; 33094000017 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 30 x 15 x 0.5 mm; 33094000018 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 35 x 15 x 0.5 mm; 33094000019 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 40 x 15 x 0.5 mm; 33094000020 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 45 x 15 x 0.5 mm; 33094000021 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 50 x 15 x 0.5 mm; 33094000022 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 55 x 15 x 0.5 mm; 33094000023 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 60 x 15 x 0.5 mm; 33094000024 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 65 x 15 x 0.5 mm; 33094000025 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 70 x 15 x 0.5 mm; 33094000026 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 75 x 15 x 0.5 mm; 33094000027 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 80 x 15 x 0.5 mm; 33094000028 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 85 x 15 x 0.5 mm; 33094000029 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 90 x 15 x 0.5 mm; 33094000030 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 95 x 15 x 0.5 mm; 33094000031 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 100 x 15 x 0.5 mm; 33094000032 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 105 x 15 x 0.5 mm; 33094000033 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 110 x 15 x 0.5 mm; 33094000034 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 30 x 16 x 0.5 mm; 33094000035 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 35 x 16 x 0.5 mm; 33094000036 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 40 x 16 x 0.5 mm; 33094000037 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 45 x 16 x 0.5 mm; 33094000038 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 50 x 16 x 0.5 mm; 33094000039 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 55 x 16 x 0.5 mm; 33094000040 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 60 x 16 x 0.5 mm; 33094000041 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 65 x 16 x 0.5 mm; 33094000042 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 70 x 16 x 0.5 mm; 33094000043 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 75 x 16 x 0.5 mm; 33094000044 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 80 x 16 x 0.5 mm; 33094000045 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 85 x 16 x 0.5 mm; 33094000046 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 90 x 16 x 0.5 mm; 33094000047 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 95 x 16 x 0.5 mm; 33094000048 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 100 x 16 x 0.5 mm; 33094000049 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 105 x 16 x 0.5 mm; 33094000050 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 110 x 16 x 0.5 mm; 33094000051 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 30 x 17 x 0.5 mm; 33094000052 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 35 x 17 x 0.5 mm; 33094000053 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 40 x 17 x 0.5 mm; 33094000054 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 45 x 17 x 0.5 mm; 33094000055 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 50 x 17 x 0.5 mm; 33094000056 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 55 x 17 x 0.5 mm; 33094000057 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 60 x 17 x 0.5 mm; 33094000058 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 65 x 17 x 0.5 mm; 33094000059 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 70 x 17 x 0.5 mm; 33094000060 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 75 x 17 x 0.5 mm; 33094000061 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 80 x 17 x 0.5 mm; 33094000062 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 85 x 17 x 0.5 mm; 33094000063 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 90 x 17 x 0.5 mm; 33094000064 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 95 x 17 x 0.5 mm; 33094000065 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 100 x 17 x 0.5 mm; 33094000066 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 105 x 17 x 0.5 mm; 33094000067 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 110 x 17 x 0.5 mm; 33094000068 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 30 x 18 x 0.5 mm; 33094000069 SAGITAL DE1 DA SLIM 5 35 x 18 x 0.5 mm;



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































33094317948 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 100 x 70 x 1.3 mm; 33094317949 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 105 x 70 x 1.3 mm; 33094317950 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 110 x 70 x 1.3 mm; 33094317951 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 30 x 75 x 1.3 mm; 33094317952 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 35 x 75 x 1.3 mm; 33094317953 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 40 x 75 x 1.3 mm; 33094317954 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 45 x 75 x 1.3 mm; 33094317955 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 50 x 75 x 1.3 mm; 33094317956 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 55 x 75 x 1.3 mm; 33094317957 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 60 x 75 x 1.3 mm; 33094317958 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 65 x 75 x 1.3 mm; 33094317959 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 70 x 75 x 1.3 mm; 33094317960 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 75 x 75 x 1.3 mm; 33094317961 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 80 x 75 x 1.3 mm; 33094317962 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 85 x 75 x 1.3 mm; 33094317963 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 90 x 75 x 1.3 mm; 33094317964 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 95 x 75 x 1.3 mm; 33094317965 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 100 x 75 x 1.3 mm; 33094317966 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 105 x 75 x 1.3 mm; 33094317967 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 110 x 75 x 1.3 mm; 33094317968 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 30 x 80 x 1.3 mm; 33094317969 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 35 x 80 x 1.3 mm; 33094317970 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 40 x 80 x 1.3 mm; 33094317971 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 45 x 80 x 1.3 mm; 33094317972 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 50 x 80 x 1.3 mm; 33094317973 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 55 x 80 x 1.3 mm; 33094317974 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 60 x 80 x 1.3 mm; 33094317975 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 65 x 80 x 1.3 mm; 33094317976 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 70 x 80 x 1.3 mm; 33094317977 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 75 x 80 x 1.3 mm; 33094317978 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 80 x 80 x 1.3 mm; 33094317979 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 85 x 80 x 1.3 mm; 33094317980 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 90 x 80 x 1.3 mm; 33094317981 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 95 x 80 x 1.3 mm; 33094317982 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 100 x 80 x 1.3 mm; 33094317983 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 105 x 80 x 1.3 mm; 33094317984 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 110 x 80 x 1.3 mm; 33094317985 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 30 x 85 x 1.3 mm; 33094317986 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 35 x 85 x 1.3 mm; 33094317987 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 40 x 85 x 1.3 mm; 33094317988 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 45 x 85 x 1.3 mm; 33094317989 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 50 x 85 x 1.3 mm; 33094317990 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 55 x 85 x 1.3 mm; 33094317991 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 60 x 85 x 1.3 mm; 33094317992 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 65 x 85 x 1.3 mm; 33094317993 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 70 x 85 x 1.3 mm; 33094317994 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 75 x 85 x 1.3 mm; 33094317995 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 80 x 85 x 1.3 mm; 33094317996 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 85 x 85 x 1.3 mm; 33094317997 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 90 x 85 x 1.3 mm; 33094317998 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 95 x 85 x 1.3 mm; 33094317999 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 100 x 85 x 1.3 mm; 33094318000 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 105 x 85 x 1.3 mm; 33094318001 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 110 x 85 x 1.3 mm; 33094318002 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 30 x 90 x 1.3 mm; 33094318003 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 35 x 90 x 1.3 mm; 33094318004 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 40 x 90 x 1.3 mm; 33094318005 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 45 x 90 x 1.3 mm; 33094318006 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 50 x 90 x 1.3 mm; 33094318007 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 55 x 90 x 1.3 mm; 33094318008 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 60 x 90 x 1.3 mm; 33094318009 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 65 x 90 x 1.3 mm; 33094318010 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 70 x 90 x 1.3 mm; 33094318011 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 75 x 90 x 1.3 mm; 33094318012 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 80 x 90 x 1.3 mm; 33094318013 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 85 x 90 x 1.3 mm; 33094318014 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 90 x 90 x 1.3 mm; 33094318015 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 95 x 90 x 1.3 mm; 33094318016 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 100 x 90 x 1.3 mm; 33094318017 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 105 x 90 x 1.3 mm; 33094318018 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 110 x 90 x 1.3 mm; 33094318019 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 30 x 95 x 1.3 mm; 33094318020 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 35 x 95 x 1.3 mm; 33094318021 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 40 x 95 x 1.3 mm; 33094318022 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 45 x 95 x 1.3 mm; 33094318023 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 50 x 95 x 1.3 mm; 33094318024 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 55 x 95 x 1.3 mm; 33094318025 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 60 x 95 x 1.3 mm; 33094318026 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 65 x 95 x 1.3 mm; 33094318027 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 70 x 95 x 1.3 mm; 33094318028 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 75 x 95 x 1.3 mm; 33094318029 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 80 x 95 x 1.3 mm; 33094318030 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 85 x 95 x 1.3 mm; 33094318031 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 90 x 95 x 1.3 mm; 33094318032 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 95 x 95 x 1.3 mm; 33094318033 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 100 x 95 x 1.3 mm; 33094318034 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 105 x 95 x 1.3 mm; 33094318035 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 110 x 95 x 1.3 mm; 33094318036 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 30 x 100 x 1.3 mm; 33094318037 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 35 x 100 x 1.3 mm; 33094318038 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 40 x 100 x 1.3 mm; 33094318039 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 45 x 100 x 1.3 mm; 33094318040 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 50 x 100 x 1.3 mm; 33094318041 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 55 x 100 x 1.3 mm; 33094318042 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 60 x 100 x 1.3 mm; 33094318043 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 65 x 100 x 1.3 mm; 33094318044 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 70 x 100 x 1.3 mm; 33094318045 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 75 x 100 x 1.3 mm; 33094318046 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 80 x 100 x 1.3 mm; 33094318047 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 85 x 100 x 1.3 mm; 33094318048 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 90 x 100 x 1.3 mm; 33094318049 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 95 x 100 x 1.3 mm; 33094318050 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 100 x 100 x 1.3 mm; 33094318051 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 105 x 100 x 1.3 mm; 33094318052 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 110 x 100 x 1.3 mm; 33094318053 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 30 x 105 x 1.3 mm; 33094318054 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 35 x 105 x 1.3 mm; 33094318055 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 40 x 105 x 1.3 mm; 33094318056 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 45 x 105 x 1.3 mm; 33094318057 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 50 x 105 x 1.3 mm; 33094318058 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 55 x 105 x 1.3 mm; 33094318059 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 60 x 105 x 1.3 mm; 33094318060 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 65 x 105 x 1.3 mm; 33094318061 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 70 x 105 x 1.3 mm; 33094318062 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 75 x 105 x 1.3 mm; 33094318063 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 80 x 105 x 1.3 mm; 33094318064 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 85 x 105 x 1.3 mm; 33094318065 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 90 x 105 x 1.3 mm; 33094318066 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 95 x 105 x 1.3 mm; 33094318067 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 100 x 105 x 1.3 mm; 33094318068 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 105 x 105 x 1.3 mm; 33094318069 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 110 x 105 x 1.3 mm; 33094318070 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 30 x 110 x 1.3 mm; 33094318071 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 35 x 110 x 1.3 mm; 33094318072 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 40 x 110 x 1.3 mm; 33094318073 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 45 x 110 x 1.3 mm; 33094318074 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 50 x 110 x 1.3 mm; 33094318075 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 55 x 110 x 1.3 mm; 33094318076 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 60 x 110 x 1.3 mm; 33094318077 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 65 x 110 x 1.3 mm; 33094318078 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 70 x 110 x 1.3 mm; 33094318079 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 75 x 110 x 1.3 mm; 33094318080 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 80 x 110 x 1.3 mm; 33094318081 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 85 x 110 x 1.3 mm; 33094318082 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 90 x 110 x 1.3 mm; 33094318083 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 95 x 110 x 1.3 mm; 33094318084 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 100 x 110 x 1.3 mm; 33094318085 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 105 x 110 x 1.3 mm; 33094318086 SAGITAL DE9 DT SLIM 5 110 x 110 x 1.3 mm.

As Lâminas para serras ósseas são fornecidas na condição estéril, acondicionadas individualmente, selado em blister e estojo de papel cartão triplex 330gr lacrado e envolto em filme de PVC retrátil, com as respectivas instruções de uso e rotulagem, contendo as informações necessárias para identificação do produto.

### **O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO.**

### **PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DE FUNCIONAMENTO**

As Lâminas para serras ósseas funcionam combinadas com produtos médicos ativos, os quais através de um sistema de transmissão mecânica movimentam as lâminas para desempenhar suas funções de cortar e retirar excessos de tecidos ósseos e tecidos duros.



Os produtos médicos ativos não fazem parte deste cadastro e, devem, portanto, ser objeto de registro próprio na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A Microdent® recomenda que as Lâminas sejam utilizadas apenas com produtos médicos ativos devidamente registrados na ANVISA.

O acoplamento das Lâminas aos produtos médicos ativos deve seguir as orientações descritas nas instruções de uso do produto médico.

### **INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE**

As Lâminas são indicadas para uso exclusivo em procedimentos cirúrgicos, devendo ser manuseadas e utilizadas apenas por profissionais capacitados, sendo obrigação do usuário utilizar e preservar o material em perfeitas condições, protegendo a si, pacientes e terceiros contra eventuais perigos.

As Lâminas foram projetadas para serem utilizadas em conjunto com o equipamento cirúrgico para ortopedia (peça de mão - produto médico ativo que deve objeto de registro à parte junto à ANVISA) com a finalidade de auxiliar em procedimentos cirúrgicos das diversas áreas médicas direcionadas a cortar e retirar excessos de ossos e tecidos duros.

**O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO. Produto estéril.**

### **ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

As Lâminas cirúrgicas são fabricadas em Aço Inoxidável Martensítico, atendendo aos requisitos especificados pela norma ASTM F899 – “Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments”.

### **ESTERILIZAÇÃO**

O produto é estéril e o fabricante recomenda o uso único.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

### **MANUSEIO E MODO DE USO**

Tendo em vista que as Lâminas são estéreis, o operador deve seguir os cuidados de manipulação de material estéril ao utilizar o produto.

Para montagem da Lâmina, siga rigorosamente as orientações do fabricante da peça de mão e:

- Retire a Lâmina da embalagem;
- Monte-a no instrumento rotatório (produto médico ativo - objeto de registro à parte na ANVISA);

A escolha da Lâmina (tipo, forma, dimensão, encaixe, dente) é definida pelo profissional habilitado em função do procedimento a ser realizado. Não utilizar Lâminas que tiveram sua embalagem molhada, perfurada ou violada. Produto em condição estéril.

As Lâminas funcionam acopladas a um produto médico ativo, onde o modo de acoplamento e utilização está diretamente ligado ao tipo de produto médico, sendo discriminado nas instruções de uso do produto médico a forma de conexão e o tipo de engate.

As Lâminas devem ser adequadas à técnica cirúrgica aplicada e, cabe ao profissional cirurgião responsável, escolher o tipo de Lâmina e o equipamento a serem utilizados.

As Lâminas devem ser manuseadas por profissionais da saúde com conhecimento específico na utilização de produtos médicos ativos e materiais de uso em saúde, para trabalhos em tecidos ósseos. O fabricante recomenda o uso único das Lâminas.

### **PRECAUÇÕES, RESTRICÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO;

O produto é esterilizado por ETO (Óxido de etileno). A esterilização possui validade de cinco anos a partir da data de esterilização, se a embalagem estiver inviolada.

Se os componentes ou a embalagem apresentarem algum dano, os mesmos não devem ser utilizados, pois o funcionamento e a esterilidade do material não estão garantidos;

Nunca utilize um dispositivo que apresente superaquecimento;

Não deixe nenhum tipo de ferramenta no paciente ou que ofereça risco de queda durante a cirurgia;

Os instrumentos rotatórios cirúrgicos são instrumentos delicados. A preparação, manutenção incorreta e o uso inadequado podem levar a um desempenho deficiente, perda e até danos ao instrumento;

As Lâminas devem ser utilizadas apenas por profissional devidamente habilitado;

Toda Lâmina deve ser preparada individualmente a fim de evitar transtornos (riscos, danos ao instrumental, ao paciente);

Não usar as Lâminas como alavanca, cunha ou submetidas à sobrecarga;

Não forçar demais a Lâmina e evitar mudanças bruscas de velocidade.

Antes da utilização do material devem-se avaliar as condições da embalagem;

Utilizar óculos de proteção, quando equipamento em funcionamento;

Arqueamento ou trincas nas Lâminas poderão causar sua ruptura, podendo agir como projétil.

Evitar quedas e impactos;

Cargas laterais excessivas podem causar superaquecimento, de modo que seja desconfortável manuseá-las.

Não coloque produtos médicos ou materiais superaquecidos no paciente. Neste caso interrompa a utilização e use-o de forma alternada;

O uso contínuo ou prolongado de uma Lâmina poderá causar desgaste e necrose térmica devido ao aquecimento pela fricção;

Não afiar as Lâminas, isso afetará sua função específica, assim como seu dimensional, acarretando risco à natureza da remoção do tecido ósseo.

O Produto médico ativo (peça de mão) no qual as Lâminas devem ser acopladas são objetos de registro à parte na ANVISA e a Microdent® recomenda o uso apenas de equipamentos devidamente regularizados.

A utilização de uma força excessiva, no momento da inserção das Lâminas Microdent® na peça de mão (produto médico ativo), poderá fazer com que o produto dobre ou quebre, causando lesões no operador;

O operador deverá manipular as Lâminas Microdent® com cuidado, pois estas podem perfurar luvas cirúrgicas;

Todas as vezes que for necessário manipular as Lâminas Microdent®, use sua haste, que está fixada na peça de mão;

Se a embalagem estiver violada, a Lâmina deverá ser descartada, pois sua esterilidade não está garantida.

A substituição de peças de mão ou da Lâmina deve ser realizada somente depois que o equipamento não estiver mais funcionando e nem superaquecido;

Assegurar-se de que a Lâmina esteja devidamente encaixada e travada antes de acionar o produto médico;

O uso de irrigação durante o procedimento e utilização da Lâmina, reduzirá a possibilidade de necrose térmica;

Contraindicações: Não se aplica;

Efeitos adversos: Não se aplica.

### **Precauções relacionadas ao descarte das Lâminas:**

Recomendamos que o material utilizado ou que apresentem danos, antes do descarte, sejam devidamente inutilizados para uso. Devem ser descartadas como lixo hospitalar potencialmente contaminante, atentar-se a legislação local do país com relação ao descarte de resíduos.

### **TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO**

O produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor excessivo, isento de contaminação particulada (poeiras e sujidades) e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

Deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada, molhada ou perfurada.

O transporte deve ser realizado em ambientes limpos, secos e frescos, isentos de umidade e calor excessivo e ao abrigo de poeiras e sujidades, de forma a assegurar a integridade do produto e de sua embalagem, evitando danos ou alterações às mesmas. Evitar quedas e impactos.

### **Transporte e Armazenamento**

Temperatura: 10 °C a 55 °C

Umidade relativa: 10 a 70%

## **SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

O produto segue em uma embalagem estéril e lacrada.

Caso haja qualquer sinal de violação na embalagem protetora, não utilizar e não esterilizar o produto.

Para qualquer sinal de violação, sinal de embalagem molhada e/ou perfurada, favor providenciar o descarte do produto, conforme legislação local.

Verifique o item **PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS** para evitar danos ao produto, ao usuário e paciente.

## **RECLAMAÇÕES DO CLIENTE**

Efeitos adversos em qualquer produto para a saúde devem ser notificados a Microdent® com a descrição do evento e dos dados de rastreabilidade que permitam a análise da causa do evento. Recomenda-se informar também o número de registro do produto. Estas informações constam nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham a embalagem do produto. Todas as ocorrências notificadas a Microdent® são recebidas pelo Departamento de Tecnovigilância e submetidas à avaliação do Comitê Técnico para investigação. Ao término da investigação, uma carta resposta é elaborada pelo Departamento de Tecnovigilância para informar ao cliente se a reclamação é procedente ou não, e no caso de procedência da reclamação, a carta informa quais providências serão tomadas. Não é esperada a ocorrência de efeitos adversos na utilização desse produto.

## **ATENÇÃO**

Não tente consertar o produto ou enviá-lo a um técnico não credenciado pela Microdent®, pois isto implicará em perda da garantia, além de oferecer riscos de danos ao produto, perda de desempenho ou riscos aos pacientes e usuários.

## **FABRICANTE**

Microdent® Aparelhos Médicos e Odontológicos Ltda.  
Rua Paulo de Frontim, 275 – Vila Virginia, CEP 14030-430  
Ribeirão Preto – S.P. – Brasil  
Fone: +55 (16) 3625 5595  
www.microdent.ind.br – microdent@microdent.com.br

**Responsável Técnico: Eng. José Marcelo Lima da Silva**  
**CREA|SP: 5069519453**

## **TERMOS DE GARANTIA**

1. A garantia se limita à substituição de peças com defeito de fabricação, devidamente constatados pela Assistência Técnica Microdent®.
2. **PERDA DA GARANTIA:** A garantia será nula quando houver danos causados pelo armazenamento inadequado ou sinais de violação, manuseio ou operação incorreta, ou ainda, quando a causa do defeito for provocada por quedas ou batidas.
3. O produto defeituoso deve ser encaminhado somente ao fabricante, Microdent Aparelhos Médicos e Odontológicos LTDA.
4. Despesas de taxas e fretes de peças, serão de responsabilidade exclusiva do comprador (cliente final), mesmo no período de garantia, desde que, o defeito tenha ocorrido por mau uso do produto ou se o comprador não seguir corretamente as instruções do manual.
5. Para solicitação da garantia, é indispensável à apresentação da nota fiscal de compra pelo consumidor final, caso contrário, a garantia extingue-se automaticamente.

**ATENÇÃO:** Para requerimento de garantia o produto deve ser encaminhado de forma completa, incluindo partes danificadas. Se o produto não for encaminhado completo não será possível fazer a análise, pois não é possível averiguar a causa do dano. Produtos enviados de forma incompleta **NÃO** serão cobertos pela garantia.



Enviar a cópia da Nota Fiscal de compra juntamente com o produto quando requerer a Garantia.