

A Microdent Aparelhos Médicos e Odontológicos, em acordo com as determinações da Instrução Normativa IN nº 04 de 2012, disponibiliza as Instruções de Uso de seus produtos em formato eletrônico para download, através do site do fabricante - endereço eletrônico: www.microdent.ind.br

IMPORTANTE: Para correta identificação do arquivo desejado, atentar-se para a Revisão da Instrução de Uso e seu nº ANVISA informados no rótulo do produto adquirido.

Caso o usuário tenha interesse em receber as Instruções de Uso em formato impresso, estas poderão ser solicitadas, sem custo de emissão e envio, através do Serviço de Atendimento ao Consumidor: +55 (16) 3610-7666, ou pelo e-mail: microdent@microdent.com.br

Instrução de Uso disponível em: www.microdent.ind.br

Versão: MAN.22.065

Código de Referência: 01034000124

Revisão: 01

Registro ANVISA nº: 10309310068

INSTRUÇÕES DE USO

LÂMINA MICRO MAX SAGITAL – SLIM 10 - ENCAIXE - SR

**PRODUTO ESTÉRIL
O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**

MAN.22.065 - 01034000124 - REV. 01 - DEZEMBRO/2023

INTRODUÇÃO

Prezado cliente, a empresa Microdent® agradece a opção pelos nossos produtos, os quais foram desenvolvidos dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetados para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança.

Este manual irá lhe fornecer detalhes importantes e gerais do produto adquirido, orientando para o uso adequado, assim como na solução de pequenos problemas que eventualmente possam ocorrer.

ATENÇÃO: PARA MAIOR SEGURANÇA:

Ler atentamente todas as instruções contidas neste manual, antes do uso do produto.

Observação: Todos os operadores devem estar cientes das instruções contidas neste manual.

O produto é estéril. O fabricante recomenda o USO ÚNICO.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Registro na ANVISA nº: 10309310068 – Classe II

Nome Técnico: Serras

Nome Comercial: Lâmina MICRO MAX

Modelos Comerciais

Os diferentes modelos diferenciam-se pelas variações nos seguintes aspectos:

- Formato da lâmina (sentido de corte): Sagital, Oscilatório e Reciprocante.
- Dentes: DA (Dentes Afiados), DG (Dentes Gêmeos), DI (Dentes Inclinados), DL (Dentes Angulares), DR (Dentes Retos), DS (Dentes Stablecut), DT (Dentes Travados).
- Encaixes: SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9.
- Dimensões: comprimento de corte, largura e espessura da lâmina.

Todas estas informações são devidamente detalhadas na rotulagem do produto.

LÂMINA SAGITAL ENCAIXE SR 1 SLIM 10 - DENTE AFIADO

3311400000 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 30 x 14 x 0.5 mm; 3311400001 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 35 x 14 x 0.5 mm; 3311400002 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 40 x 14 x 0.5 mm; 3311400003 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 45 x 14 x 0.5 mm; 3311400004 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 50 x 14 x 0.5 mm; 3311400005 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 55 x 14 x 0.5 mm; 3311400006 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 60 x 14 x 0.5 mm; 3311400007 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 65 x 14 x 0.5 mm; 3311400008 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 70 x 14 x 0.5 mm; 3311400009 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 75 x 14 x 0.5 mm; 3311400010 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 80 x 14 x 0.5 mm; 3311400011 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 85 x 14 x 0.5 mm; 3311400012 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 90 x 14 x 0.5 mm; 3311400013 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 95 x 14 x 0.5 mm; 3311400014 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 100 x 14 x 0.5 mm; 3311400015 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 105 x 14 x 0.5 mm; 3311400016 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 110 x 14 x 0.5 mm; 3311400017 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 30 x 15 x 0.5 mm; 3311400018 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 35 x 15 x 0.5 mm; 3311400019 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 40 x 15 x 0.5 mm; 3311400020 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 45 x 15 x 0.5 mm; 3311400021 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 50 x 15 x 0.5 mm; 3311400022 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 55 x 15 x 0.5 mm; 3311400023 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 60 x 15 x 0.5 mm; 3311400024 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 65 x 15 x 0.5 mm; 3311400025 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 70 x 15 x 0.5 mm; 3311400026 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 75 x 15 x 0.5 mm; 3311400027 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 80 x 15 x 0.5 mm; 3311400028 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 85 x 15 x 0.5 mm; 3311400029 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 90 x 15 x 0.5 mm; 3311400030 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 95 x 15 x 0.5 mm; 3311400031 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 100 x 15 x 0.5 mm; 3311400032 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 105 x 15 x 0.5 mm; 3311400033 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 110 x 15 x 0.5 mm; 3311400034 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 30 x 16 x 0.5 mm; 3311400035 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 35 x 16 x 0.5 mm; 3311400036 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 40 x 16 x 0.5 mm; 3311400037 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 45 x 16 x 0.5 mm; 3311400038 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 50 x 16 x 0.5 mm; 3311400039 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 55 x 16 x 0.5 mm; 3311400040 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 60 x 16 x 0.5 mm; 3311400041 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 65 x 16 x 0.5 mm; 3311400042 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 70 x 16 x 0.5 mm; 3311400043 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 75 x 16 x 0.5 mm; 3311400044 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 80 x 16 x 0.5 mm; 3311400045 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 85 x 16 x 0.5 mm; 3311400046 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 90 x 16 x 0.5 mm; 3311400047 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 95 x 16 x 0.5 mm; 3311400048 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 100 x 16 x 0.5 mm; 3311400049 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 105 x 16 x 0.5 mm; 3311400050 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 110 x 16 x 0.5 mm; 3311400051 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 30 x 17 x 0.5 mm; 3311400052 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 35 x 17 x 0.5 mm; 3311400053 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 40 x 17 x 0.5 mm; 3311400054 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 45 x 17 x 0.5 mm; 3311400055 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 50 x 17 x 0.5 mm; 3311400056 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 55 x 17 x 0.5 mm; 3311400057 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 60 x 17 x 0.5 mm; 3311400058 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 65 x 17 x 0.5 mm; 3311400059 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 70 x 17 x 0.5 mm; 3311400060 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 75 x 17 x 0.5 mm; 3311400061 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 80 x 17 x 0.5 mm; 3311400062 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 85 x 17 x 0.5 mm; 3311400063 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 90 x 17 x 0.5 mm; 3311400064 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 95 x 17 x 0.5 mm; 3311400065 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 100 x 17 x 0.5 mm; 3311400066 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 105 x 17 x 0.5 mm; 3311400067 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 110 x 17 x 0.5 mm; 3311400068 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 30 x 18 x 0.5 mm; 3311400069 SAGITAL SR1 DA SLIM 10 35 x 18 x 0.5

100 x 100 x 1.3 mm; 33114318051 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 105 x 100 x 1.3 mm; 33114318052 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 110 x 100 x 1.3 mm; 33114318053 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 30 x 105 x 1.3 mm; 33114318054 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 35 x 105 x 1.3 mm; 33114318055 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 40 x 105 x 1.3 mm; 33114318056 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 45 x 105 x 1.3 mm; 33114318057 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 50 x 105 x 1.3 mm; 33114318058 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 55 x 105 x 1.3 mm; 33114318059 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 60 x 105 x 1.3 mm; 33114318060 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 65 x 105 x 1.3 mm; 33114318061 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 70 x 105 x 1.3 mm; 33114318062 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 75 x 105 x 1.3 mm; 33114318063 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 80 x 105 x 1.3 mm; 33114318064 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 85 x 105 x 1.3 mm; 33114318065 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 90 x 105 x 1.3 mm; 33114318066 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 95 x 105 x 1.3 mm; 33114318067 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 100 x 105 x 1.3 mm; 33114318068 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 105 x 105 x 1.3 mm; 33114318069 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 110 x 105 x 1.3 mm; 33114318070 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 30 x 110 x 1.3 mm; 33114318071 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 35 x 110 x 1.3 mm; 33114318072 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 40 x 110 x 1.3 mm; 33114318073 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 45 x 110 x 1.3 mm; 33114318074 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 50 x 110 x 1.3 mm; 33114318075 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 55 x 110 x 1.3 mm; 33114318076 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 60 x 110 x 1.3 mm; 33114318077 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 65 x 110 x 1.3 mm; 33114318078 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 70 x 110 x 1.3 mm; 33114318079 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 75 x 110 x 1.3 mm; 33114318080 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 80 x 110 x 1.3 mm; 33114318081 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 85 x 110 x 1.3 mm; 33114318082 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 90 x 110 x 1.3 mm; 33114318083 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 95 x 110 x 1.3 mm; 33114318084 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 100 x 110 x 1.3 mm; 33114318085 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 105 x 110 x 1.3 mm; 33114318086 SAGITAL SR9 DT SLIM 10 110 x 110 x 1.3 mm.

As Lâminas para serras ósseas são fornecidas na condição estéril, acondicionadas individualmente, selado em blister e estojo de papel cartão triplex 330gr lacrado e envolto em filme de PVC retrátil, com as respectivas instruções de uso e rotulagem, contendo as informações necessárias para identificação do produto.

O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO.

PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DE FUNCIONAMENTO

As Lâminas para serras ósseas funcionam combinadas com produtos médicos ativos, os quais através de um sistema de transmissão mecânica movimentam as lâminas para desempenhar suas funções de cortar e retirar excessos de tecidos ósseos e tecidos duros.

Os produtos médicos ativos não fazem parte deste cadastro e, devem, portanto, ser objeto de registro próprio na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A Microdent[®] recomenda que as Lâminas sejam utilizadas apenas com produtos médicos ativos devidamente registrados na ANVISA.

O acoplamento das Lâminas aos produtos médicos ativos deve seguir as orientações descritas nas instruções de uso do produto médico.

INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

As Lâminas são indicadas para uso exclusivo em procedimentos cirúrgicos, devendo ser manuseadas e utilizadas apenas por profissionais capacitados, sendo obrigação do usuário utilizar e preservar o material em perfeitas condições, protegendo a si, pacientes e terceiros contra eventuais perigos.

As Lâminas foram projetadas para serem utilizadas em conjunto com o equipamento cirúrgico para ortopedia (peça de mão - produto médico ativo que deve objeto de registro à parte junto à ANVISA) com a finalidade de auxiliar em procedimentos cirúrgicos das diversas áreas médicas direcionadas a cortar e retirar excessos de ossos e tecidos duros.

O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO. Produto estéril.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As Lâminas cirúrgicas são fabricadas em Aço Inoxidável Martensítico, atendendo aos requisitos especificados pela norma ASTM F899 – “Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments”.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é estéril e o fabricante recomenda o uso único.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

MANUSEIO E MODO DE USO

Tendo em vista que as Lâminas são estéreis, o operador deve seguir os cuidados de manipulação de material estéril ao utilizar o produto.

Para montagem da Lâmina, siga rigorosamente as orientações do fabricante da peça de mão e:

- Retire a Lâmina da embalagem;
- Monte-a no instrumento rotatório (produto médico ativo - objeto de registro à parte na ANVISA);

A escolha da Lâmina (tipo, forma, dimensão, encaixe, dente) é definida pelo profissional habilitado em função do procedimento a ser realizado. Não utilizar Lâminas que tiveram sua embalagem molhada, perfurada ou violada. Produto em condição estéril.

As Lâminas funcionam acopladas a um produto médico ativo, onde o modo de acoplamento e utilização está diretamente ligado ao tipo de produto médico, sendo discriminado nas instruções de uso do produto médico a forma de conexão e o tipo de engate.

As Lâminas devem ser adequadas à técnica cirúrgica aplicada e, cabe ao profissional cirurgião responsável, escolher o tipo de Lâmina e o equipamento a serem utilizados.

As Lâminas devem ser manuseadas por profissionais da saúde com conhecimento específico na utilização de produtos médicos ativos e materiais de uso em saúde, para trabalhos em tecidos ósseos. O fabricante recomenda o uso único das Lâminas.

PRECAUÇÕES, RESTRICÕES E ADVERTÊNCIAS

O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO;

O produto é esterilizado por ETO (Óxido de etileno). A esterilização possui validade de cinco anos a partir da data de esterilização, se a embalagem estiver inviolada.

Se os componentes ou a embalagem apresentarem algum dano, os mesmos não devem ser utilizados, pois o funcionamento e a esterilidade do material não estão garantidos;

Nunca utilize um dispositivo que apresente superaquecimento;

Não deixe nenhum tipo de ferramenta no paciente ou que ofereça risco de queda durante a cirurgia;

Os instrumentos rotatórios cirúrgicos são instrumentos delicados. A preparação, manutenção incorreta e o uso inadequado podem levar a um desempenho deficiente, perda e até danos ao instrumento;

As Lâminas devem ser utilizadas apenas por profissional devidamente habilitado;

Toda Lâmina deve ser preparada individualmente a fim de evitar transtornos (riscos, danos ao instrumental, ao paciente);

Não usar as Lâminas como alavanca, cunha ou submetidas à sobrecarga;

Não forçar demais a Lâmina e evitar mudanças bruscas de velocidade.

Antes da utilização do material devem-se avaliar as condições da embalagem;

Utilizar óculos de proteção, quando equipamento em funcionamento;

Arqueamento ou trincas nas Lâminas poderão causar sua ruptura, podendo agir como projétil.

Evitar quedas e impactos;

Cargas laterais excessivas podem causar superaquecimento, de modo que seja desconfortável manuseá-las.

Não coloque produtos médicos ou materiais superaquecidos no paciente. Neste caso interrompa a utilização e use-o de forma alternada;

O uso contínuo ou prolongado de uma Lâmina poderá causar desgaste e necrose térmica devido ao aquecimento pela fricção;

Não afiar as Lâminas, isso afetará sua função específica, assim como seu dimensional, acarretando risco à natureza da remoção do tecido ósseo.

O Produto médico ativo (peça de mão) no qual as Lâminas devem ser acopladas são objetos de registro à parte na ANVISA e a Microdent[®] recomenda o uso apenas de equipamentos devidamente regularizados.

A utilização de uma força excessiva, no momento da inserção das Lâminas Microdent[®] na peça de mão (produto médico ativo), poderá fazer com que o produto dobre ou quebre, causando lesões no operador;

O operador deverá manipular as Lâminas Microdent[®] com cuidado, pois estas podem perfurar luvas cirúrgicas;

Todas as vezes que for necessário manipular as Lâminas Microdent[®], use sua haste, que está fixada na peça de mão;

Se a embalagem estiver violada, a Lâmina deverá ser descartada, pois sua esterilidade não está garantida.

A substituição de peças de mão ou da Lâmina deve ser realizada somente depois que o equipamento não estiver mais funcionando e nem superaquecido;

Assegurar-se de que a Lâmina esteja devidamente encaixada e travada antes de acionar o produto médico;

O uso de irrigação durante o procedimento e utilização da Lâmina, reduzirá a possibilidade de necrose térmica;

Contraindicações: Não se aplica;

Efeitos adversos: Não se aplica.

Precauções relacionadas ao descarte das Lâminas:

Recomendamos que o material utilizado ou que apresentem danos, antes do descarte, sejam devidamente inutilizados para uso. Devem ser descartadas como lixo hospitalar potencialmente contaminante, atentar-se a legislação local do país com relação ao descarte de resíduos.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor excessivo, isento de contaminação particulada (poeiras e sujidades) e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

Deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada, molhada ou perfurada.

O transporte deve ser realizado em ambientes limpos, secos e frescos, isentos de umidade e calor excessivo e ao abrigo de poeiras e sujidades, de forma a assegurar a integridade do produto e de sua embalagem, evitando danos ou alterações às mesmas. Evitar quedas e impactos.

Transporte e Armazenamento

Temperatura: 10 °C a 55 °C

Umidade relativa: 10 a 70%

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O produto segue em uma embalagem estéril e lacrada.

Caso haja qualquer sinal de violação na embalagem protetora, não utilizar e não esterilizar o produto.

Para qualquer sinal de violação, sinal de embalagem molhada e/ou perfurada, favor providenciar o descarte do produto, conforme legislação local.

Verifique o item PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS para evitar danos ao produto, ao usuário e paciente.

RECLAMAÇÕES DO CLIENTE

Efeitos adversos em qualquer produto para a saúde devem ser notificados a Microdent® com a descrição do evento e dos dados de rastreabilidade que permitam a análise da causa do evento. Recomenda-se informar também o número de registro do produto. Estas informações constam nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham a embalagem do produto. Todas as ocorrências notificadas a Microdent® são recebidas pelo Departamento de Tecnovigilância e submetidas à avaliação do Comitê Técnico para investigação. Ao término da investigação, uma carta resposta é elaborada pelo Departamento de Tecnovigilância para informar ao cliente se a reclamação é procedente ou não, e no caso de procedência da reclamação, a carta informa quais providências serão tomadas. Não é esperada a ocorrência de efeitos adversos na utilização desse produto.

ATENÇÃO

Não tente consertar o produto ou enviá-lo a um técnico não credenciado pela Microdent®, pois isto implicará em perda da garantia, além de oferecer riscos de danos ao produto, perda de desempenho ou riscos aos pacientes e usuários.

FABRICANTE

Microdent® Aparelhos Médicos e Odontológicos Ltda.
Rua Paulo de Frontim, 275 – Vila Virginia, CEP 14030-430
Ribeirão Preto – S.P. – Brasil

Responsável Técnico: Eng. José Marcelo Lima da Silva

CREA/SP: 5069519453

TERMOS DE GARANTIA

1. A garantia se limita à substituição de peças com defeito de fabricação, devidamente constatados pela Assistência Técnica Microdent®.
2. **PERDA DA GARANTIA:** A garantia será nula quando houver danos causados pelo armazenamento inadequado ou sinais de violação, manuseio ou operação incorreta, ou ainda, quando a causa do defeito for provocada por quedas ou batidas.
3. O produto defeituoso deve ser encaminhado somente ao fabricante, Microdent Aparelhos Médicos e Odontológicos LTDA.
4. Despesas de taxas e fretes de peças, serão de responsabilidade exclusiva do comprador (cliente final), mesmo no período de garantia, desde que, o defeito tenha ocorrido por mau uso do produto ou se o comprador não seguir corretamente as instruções do manual.
5. Para solicitação da garantia, é indispensável à apresentação da nota fiscal de compra pelo consumidor final, caso contrário, a garantia extingue-se automaticamente.

ATENÇÃO: Para requerimento de garantia o produto deve ser encaminhado de forma completa, incluindo partes danificadas. Se o produto não for encaminhado completo não será possível fazer a análise, pois não é possível averiguar a causa do dano. Produtos enviados de forma incompleta **NÃO** serão cobertos pela garantia.

Enviar a cópia da Nota Fiscal de compra juntamente com o produto quando requerer a Garantia.