

A Microdent Aparelhos Médicos e Odontológicos, em acordo com as determinações da Instrução Normativa IN nº 04 de 2012, disponibiliza as Instruções de Uso de seus produtos em formato eletrônico para download, através do site do fabricante - endereço eletrônico: www.microdent.ind.br

IMPORTANTE: Para correta identificação do arquivo desejado, atentar-se para a Revisão da Instrução de Uso e seu nº ANVISA informados no rótulo do produto adquirido.

Caso o usuário tenha interesse em receber as Instruções de Uso em formato impresso, estas poderão ser solicitadas, sem custo de emissão e envio, através do Serviço de Atendimento ao Consumidor: +55 (16) 3610-7666, ou pelo e-mail: microdent@microdent.com.br

Instrução de Uso disponível em: www.microdent.ind.br

Versão: MAN.22.065

Código de Referência: 01034000160

Revisão: 01

Registro ANVISA nº: 10309310068

INSTRUÇÕES DE USO

LÂMINA MICRO MAX RECIPROCANTE ARQUIADA / RECIPROCANTE COM RAIO

**PRODUTO ESTÉRIL
O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**

MAN.22.065 - 01034000160 - REV. 01 - DEZEMBRO/2023

INTRODUÇÃO

Prezado cliente, a empresa Microdent® agradece a opção pelos nossos produtos, os quais foram desenvolvidos dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetados para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança.

Este manual irá lhe fornecer detalhes importantes e gerais do produto adquirido, orientando para o uso adequado, assim como na solução de pequenos problemas que eventualmente possam ocorrer.

ATENÇÃO: PARA MAIOR SEGURANÇA:

Ler atentamente todas as instruções contidas neste manual, antes do uso do produto.

Observação: Todos os operadores devem estar cientes das instruções contidas neste manual.

O produto é estéril. O fabricante recomenda o USO ÚNICO.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Registro na ANVISA nº: 10309310068 – Classe II

Nome Técnico: Serras

Nome Comercial: Lâmina MICRO MAX

Modelos Comerciais – LÂMINA RECIPROCANTE ARQUEADA

Os diferentes modelos diferenciam-se pelas variações nos seguintes aspectos:

- Formato da lâmina (sentido de corte): Sagital, Oscilatório e Reciprocante.
- Dentes: DI (Dentes Inclinados), DR (Dentes Retos), DS (Dentes Stablecut), DT (Dentes Travados).
- Encaixes: ST, SY, LT, HZ, DE, MA, AE, NS, DLL, TM, SR, TV, MD.
- Dimensões: comprimento de corte, largura e espessura da lâmina.

Todas estas informações são devidamente detalhadas na rotulagem do produto.

LÂMINA RECIPROCANTE ARQUIADA ENCAIXE ST 1 – DENTE INCLINADO

33263000000 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 20 x 0.4 mm; 33263000001 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 20.5 x 0.4 mm; 33263000002 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 21 x 0.4 mm; 33263000003 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 21.5 x 0.4 mm; 33263000004 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 22 x 0.4 mm; 33263000005 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 22.5 x 0.4 mm; 33263000006 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 23 x 0.4 mm; 33263000007 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 23.5 x 0.4 mm; 33263000008 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 24 x 0.4 mm; 33263000009 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 24.5 x 0.4 mm; 33263000010 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 25 x 0.4 mm; 33263000011 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 25.5 x 0.4 mm; 33263000012 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 26 x 0.4 mm; 33263000013 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 26.5 x 0.4 mm; 33263000014 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 27 x 0.4 mm; 33263000015 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 27.5 x 0.4 mm; 33263000016 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 28 x 0.4 mm; 33263000017 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 28.5 x 0.4 mm; 33263000018 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 29 x 0.4 mm; 33263000019 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 29.5 x 0.4 mm; 33263000020 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 30 x 0.4 mm; 33263000021 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 30.5 x 0.4 mm; 33263000022 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 31 x 0.4 mm; 33263000023 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 31.5 x 0.4 mm; 33263000024 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 32 x 0.4 mm; 33263000025 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 32.5 x 0.4 mm; 33263000026 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 33 x 0.4 mm; 33263000027 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 33.5 x 0.4 mm; 33263000028 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 34 x 0.4 mm; 33263000029 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 34.5 x 0.4 mm; 33263000030 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 35 x 0.4 mm; 33263000031 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 35.5 x 0.4 mm; 33263000032 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 36 x 0.4 mm; 33263000033 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 36.5 x 0.4 mm; 33263000034 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 37 x 0.4 mm; 33263000035 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 37.5 x 0.4 mm; 33263000036 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 38 x 0.4 mm; 33263000037 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 38.5 x 0.4 mm; 33263000038 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 39 x 0.4 mm; 33263000039 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 39.5 x 0.4 mm; 33263000040 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 40 x 0.4 mm; 33263000041 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 40.5 x 0.4 mm; 33263000042 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 41 x 0.4 mm; 33263000043 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 41.5 x 0.4 mm; 33263000044 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 42 x 0.4 mm; 33263000045 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 42.5 x 0.4 mm; 33263000046 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 43 x 0.4 mm; 33263000047 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 43.5 x 0.4 mm; 33263000048 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 44 x 0.4 mm; 33263000049 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 44.5 x 0.4 mm; 33263000050 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 45 x 0.4 mm; 33263000051 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 20 x 0.5 mm; 33263000052 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 20.5 x 0.5 mm; 33263000053 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 21 x 0.5 mm; 33263000054 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 21.5 x 0.5 mm; 33263000055 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 22 x 0.5 mm; 33263000056 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 22.5 x 0.5 mm; 33263000057 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 23 x 0.5 mm; 33263000058 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 23.5 x 0.5 mm; 33263000059 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 24 x 0.5 mm; 33263000060 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 24.5 x 0.5 mm; 33263000061 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 25 x 0.5 mm; 33263000062 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 25.5 x 0.5 mm; 33263000063 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 26 x 0.5 mm; 33263000064 RECIPROCANTE ARQUIADA DI ST1 26.5 x 0.5 mm; 33263000065

RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 36 x 0.8 mm;	33269002430	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 36.5 x 0.8 mm;	33269002431
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 37 x 0.8 mm;	33269002432	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 37.5 x 0.8 mm;	33269002433
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 38 x 0.8 mm;	33269002434	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 38.5 x 0.8 mm;	33269002435
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 39 x 0.8 mm;	33269002436	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 39.5 x 0.8 mm;	33269002437
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 40 x 0.8 mm;	33269002438	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 40.5 x 0.8 mm;	33269002439
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 41 x 0.8 mm;	33269002440	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 41.5 x 0.8 mm;	33269002441
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 42 x 0.8 mm;	33269002442	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 42.5 x 0.8 mm;	33269002443
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 43 x 0.8 mm;	33269002444	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 43.5 x 0.8 mm;	33269002445
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 44 x 0.8 mm;	33269002446	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 44.5 x 0.8 mm;	33269002447
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE1 45 x 0.8 mm.			

LÂMINA RECIPROCANTE ARQUIADA ENCAIXE AE 2 – DENTE TRAVADO

33269002448	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 20 x 0.4 mm;	33269002449	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 20.5 x 0.4 mm;	33269002450
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 21 x 0.4 mm;	33269002451	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 21.5 x 0.4 mm;	33269002452	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 22 x 0.4 mm;	33269002453	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 22.5 x 0.4 mm;	33269002454	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 23 x 0.4 mm;	33269002455	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 23.5 x 0.4 mm;	33269002456	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 24 x 0.4 mm;	33269002457	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 24.5 x 0.4 mm;	33269002458	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 25 x 0.4 mm;	33269002459	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 25.5 x 0.4 mm;	33269002460	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 26 x 0.4 mm;	33269002461	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 26.5 x 0.4 mm;	33269002462	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 27 x 0.4 mm;	33269002463	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 27.5 x 0.4 mm;	33269002464	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 28 x 0.4 mm;	33269002465	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 28.5 x 0.4 mm;	33269002466	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 29 x 0.4 mm;	33269002467	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 29.5 x 0.4 mm;	33269002468	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 30 x 0.4 mm;	33269002469	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 30.5 x 0.4 mm;	33269002470	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 31 x 0.4 mm;	33269002471	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 31.5 x 0.4 mm;	33269002472	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 32 x 0.4 mm;	33269002473	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 32.5 x 0.4 mm;	33269002474	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 33 x 0.4 mm;	33269002475	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 33.5 x 0.4 mm;	33269002476	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 34 x 0.4 mm;	33269002477	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 34.5 x 0.4 mm;	33269002478	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 35 x 0.4 mm;	33269002479	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 35.5 x 0.4 mm;	33269002480	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 36 x 0.4 mm;	33269002481	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 36.5 x 0.4 mm;	33269002482	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 37 x 0.4 mm;	33269002483	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 37.5 x 0.4 mm;	33269002484	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 38 x 0.4 mm;	33269002485	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 38.5 x 0.4 mm;	33269002486	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 39 x 0.4 mm;	33269002487	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 39.5 x 0.4 mm;	33269002488	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 40 x 0.4 mm;	33269002489	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 40.5 x 0.4 mm;	33269002490	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 41 x 0.4 mm;	33269002491	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 41.5 x 0.4 mm;	33269002492	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 42 x 0.4 mm;	33269002493	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 42.5 x 0.4 mm;	33269002494	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 43 x 0.4 mm;	33269002495	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 43.5 x 0.4 mm;	33269002496	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 44 x 0.4 mm;	33269002497	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 44.5 x 0.4 mm;	33269002498	
RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 45 x 0.4 mm;	33269002499	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 20 x 0.5 mm;	33269002500	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 20.5 x 0.5 mm;
33269002501	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 21 x 0.5 mm;	33269002502	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 21.5 x 0.5 mm;	33269002503
33269002504	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 22 x 0.5 mm;	33269002506	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 23 x 0.5 mm;	33269002507
33269002508	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 24 x 0.5 mm;	33269002510	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 25 x 0.5 mm;	33269002511
33269002512	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 26 x 0.5 mm;	33269002514	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 27 x 0.5 mm;	33269002515
33269002516	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 28 x 0.5 mm;	33269002518	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 29 x 0.5 mm;	33269002519
33269002520	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 30 x 0.5 mm;	33269002522	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 31 x 0.5 mm;	33269002523
33269002524	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 32 x 0.5 mm;	33269002526	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 33 x 0.5 mm;	33269002527
33269002528	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 34 x 0.5 mm;	33269002530	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 35 x 0.5 mm;	33269002531
33269002532	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 36 x 0.5 mm;	33269002534	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 37 x 0.5 mm;	33269002535
33269002536	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 38 x 0.5 mm;	33269002538	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 39 x 0.5 mm;	33269002539
33269002540	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 40 x 0.5 mm;	33269002542	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 41 x 0.5 mm;	33269002543
33269002544	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 42 x 0.5 mm;	33269002546	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 43 x 0.5 mm;	33269002547
33269002548	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 44 x 0.5 mm;	33269002550	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 20 x 0.8 mm;	33269002551
33269002552	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 21 x 0.8 mm;	33269002553	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 21.5 x 0.8 mm;	33269002554
33269002555	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 22 x 0.8 mm;	33269002557	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 23.5 x 0.8 mm;	33269002558
33269002562	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 25 x 0.8 mm;	33269002563	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 26 x 0.8 mm;	33269002564
33269002566	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 27 x 0.8 mm;	33269002567	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 28 x 0.8 mm;	33269002568
33269002569	RECIPROCANTE ARQUIADA DT AE2 29 x 0.8 mm;			

33276000765	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	20 x 0.4 mm;	33276000766	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	20.5 x 0.4 mm;	33276000767
33276000768	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	21 x 0.4 mm;	33276000770	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	22.5 x 0.4 mm;	33276000771
33276000772	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	23 x 0.4 mm;	33276000774	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	24.5 x 0.4 mm;	33276000775
33276000776	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	25 x 0.4 mm;	33276000778	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	26.5 x 0.4 mm;	33276000779
33276000780	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	27 x 0.4 mm;	33276000782	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	28.5 x 0.4 mm;	33276000783
33276000784	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	29 x 0.4 mm;	33276000786	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	30.5 x 0.4 mm;	33276000787
33276000788	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	31 x 0.4 mm;	33276000790	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	32.5 x 0.4 mm;	33276000791
33276000792	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	34 x 0.4 mm;	33276000796	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	35.5 x 0.4 mm;	33276000797
33276000798	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	36 x 0.4 mm;	33276000802	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	38.5 x 0.4 mm;	33276000803
33276000804	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	39 x 0.4 mm;	33276000806	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	40.5 x 0.4 mm;	33276000807
33276000808	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	41 x 0.4 mm;	33276000812	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	43.5 x 0.4 mm;	33276000813
33276000814	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	44 x 0.4 mm;	33276000816	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	20 x 0.5 mm;	33276000817
33276000818	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	20.5 x 0.5 mm;	33276000820	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	22 x 0.5 mm;	33276000821
33276000822	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	22.5 x 0.5 mm;	33276000824	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	24 x 0.5 mm;	33276000825
33276000826	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	24.5 x 0.5 mm;	33276000828	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	26 x 0.5 mm;	33276000829
33276000830	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	26.5 x 0.5 mm;	33276000832	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	28 x 0.5 mm;	33276000833
33276000834	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	28.5 x 0.5 mm;	33276000836	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	30 x 0.5 mm;	33276000837
33276000838	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	30.5 x 0.5 mm;	33276000842	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	33 x 0.5 mm;	33276000843
33276000844	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	33.5 x 0.5 mm;	33276000846	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	35 x 0.5 mm;	33276000847
33276000848	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	35.5 x 0.5 mm;	33276000850	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	37 x 0.5 mm;	33276000851
33276000852	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	37.5 x 0.5 mm;	33276000854	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	39 x 0.5 mm;	33276000855
33276000856	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	39.5 x 0.5 mm;	33276000858	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	41 x 0.5 mm;	33276000859
33276000860	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	41.5 x 0.5 mm;	33276000862	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	43 x 0.5 mm;	33276000863
33276000864	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	43.5 x 0.5 mm;	33276000866	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	45 x 0.5 mm;	33276000867
33276000868	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	20 x 0.8 mm;	33276000870	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	21.5 x 0.8 mm;	33276000871
33276000872	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	22 x 0.8 mm;	33276000874	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	23.5 x 0.8 mm;	33276000875
33276000876	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	24 x 0.8 mm;	33276000878	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	25.5 x 0.8 mm;	33276000879
33276000880	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	26 x 0.8 mm;	33276000882	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	27.5 x 0.8 mm;	33276000883
33276000884	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	28 x 0.8 mm;	33276000886	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	29.5 x 0.8 mm;	33276000887
33276000888	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	30 x 0.8 mm;	33276000890	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	31.5 x 0.8 mm;	33276000889
33276000892	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	32 x 0.8 mm;	33276000894	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	34.5 x 0.8 mm;	33276000897
33276000896	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	35 x 0.8 mm;	33276000898	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	35.5 x 0.8 mm;	33276000899
33276000900	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	36 x 0.8 mm;	33276000902	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	37.5 x 0.8 mm;	33276000903
33276000904	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	38 x 0.8 mm;	33276000906	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	39.5 x 0.8 mm;	33276000907
33276000908	RECIPROCANTE	ARQUIADA	DR	MD1	40 x 0.8 mm;							

LÂMINA RECIPROCANTE COM RAIO ENCAIXE MD 1 – DENTE TRAVADO

33290001665 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 7 x 0.4 mm; 33290001666 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 7.5 x 0.4 mm; 33290001667 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 8 x 0.4 mm; 33290001668 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 8.5 x 0.4 mm; 33290001669 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 9 x 0.4 mm; 33290001670 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 9.5 x 0.4 mm; 33290001671 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 10 x 0.4 mm; 33290001672 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 10.5 x 0.4 mm; 33290001673 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 11 x 0.4 mm; 33290001674 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 11.5 x 0.4 mm; 33290001675 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 12 x 0.4 mm; 33290001676 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 12.5 x 0.4 mm; 33290001677 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 13 x 0.4 mm; 33290001678 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 13.5 x 0.4 mm; 33290001679 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 14 x 0.4 mm; 33290001680 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 14.5 x 0.4 mm; 33290001681 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 15 x 0.4 mm; 33290001682 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 15.5 x 0.4 mm; 33290001683 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 16 x 0.4 mm; 33290001684 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 16.5 x 0.4 mm; 33290001685 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 17 x 0.4 mm; 33290001686 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 17.5 x 0.4 mm; 33290001687 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 18 x 0.4 mm; 33290001688 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 18.5 x 0.4 mm; 33290001689 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 19 x 0.4 mm; 33290001690 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 19.5 x 0.4 mm; 33290001691 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 20 x 0.4 mm; 33290001692 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 20.5 x 0.4 mm; 33290001693 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 21 x 0.4 mm; 33290001694 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 21.5 x 0.4 mm; 33290001695 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 22 x 0.4 mm; 33290001696 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 22.5 x 0.4 mm; 33290001697 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 23 x 0.4 mm; 33290001698 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 23.5 x 0.4 mm; 33290001699 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 24 x 0.4 mm; 33290001700 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 24.5 x 0.4 mm; 33290001701 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 25 x 0.4 mm; 33290001702 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 7 x 0.5 mm; 33290001703 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 7.5 x 0.5 mm; 33290001704 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 8 x 0.5 mm; 33290001705 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 8.5 x 0.5 mm; 33290001706 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 9 x 0.5 mm; 33290001707 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 9.5 x 0.5 mm; 33290001708 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 10 x 0.5 mm; 33290001709 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 10.5 x 0.5 mm; 33290001710 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 11 x 0.5 mm; 33290001711 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 11.5 x 0.5 mm; 33290001712 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 12 x 0.5 mm; 33290001713 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 12.5 x 0.5 mm; 33290001714 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 13 x 0.5 mm; 33290001715 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 13.5 x 0.5 mm; 33290001716 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 14 x 0.5 mm; 33290001717 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 14.5 x 0.5 mm; 33290001718 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 15 x 0.5 mm; 33290001719 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 15.5 x 0.5 mm; 33290001720 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 16 x 0.5 mm; 33290001721 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 16.5 x 0.5 mm; 33290001722 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 17 x 0.5 mm; 33290001723 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 17.5 x 0.5 mm; 33290001724 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 18 x 0.5 mm; 33290001725 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 18.5 x 0.5 mm; 33290001726 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 19 x 0.5 mm; 33290001727 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 19.5 x 0.5 mm; 33290001728 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 20 x 0.5 mm; 33290001729 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 20.5 x 0.5 mm; 33290001730 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 21 x 0.5 mm; 33290001731 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 21.5 x 0.5 mm; 33290001732 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 22 x 0.5 mm; 33290001733 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 22.5 x 0.5 mm; 33290001734 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 23 x 0.5 mm; 33290001735 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 23.5 x 0.5 mm; 33290001736 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 24 x 0.5 mm; 33290001737 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 24.5 x 0.5 mm; 33290001738 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 25 x 0.5 mm; 33290001739 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 7 x 0.8 mm; 33290001740 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 7.5 x 0.8 mm; 33290001741 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 8 x 0.8 mm; 33290001742 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 8.5 x 0.8 mm; 33290001743 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 9 x 0.8 mm; 33290001744 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 9.5 x 0.8 mm; 33290001745 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 10 x 0.8 mm; 33290001746 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 10.5 x 0.8 mm; 33290001747 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 11 x 0.8 mm; 33290001748 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 11.5 x 0.8 mm; 33290001749 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 12 x 0.8 mm; 33290001750 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 12.5 x 0.8 mm; 33290001751 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 13 x 0.8 mm; 33290001752 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 13.5 x 0.8 mm; 33290001753 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 14 x 0.8 mm; 33290001754 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 14.5 x 0.8 mm; 33290001755 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 15 x 0.8 mm; 33290001756 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 15.5 x 0.8 mm; 33290001757 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 16 x 0.8 mm; 33290001758 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 16.5 x 0.8 mm; 33290001759 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 17 x 0.8 mm; 33290001760 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 17.5 x 0.8 mm; 33290001761 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 18 x 0.8 mm; 33290001762 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 18.5 x 0.8 mm; 33290001763 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 19 x 0.8 mm; 33290001764 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 19.5 x 0.8 mm; 33290001765 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 20 x 0.8 mm; 33290001766 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 20.5 x 0.8 mm; 33290001767 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 21 x 0.8 mm; 33290001768 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 21.5 x 0.8 mm; 33290001769 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 22 x 0.8 mm; 33290001770 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 22.5 x 0.8 mm; 33290001771 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 23 x 0.8 mm; 33290001772 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 23.5 x 0.8 mm; 33290001773 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 24 x 0.8 mm; 33290001774 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 24.5 x 0.8 mm; 33290001775 RECIPROCANTE COM RAIO DT MD1 25 x 0.8 mm.

As Lâminas para serras ósseas são fornecidas na condição estéril, acondicionadas individualmente, selado em blister e estojo de papel cartão triplex 330gr lacrado e envolto em filme de PVC retrátil, com as respectivas instruções de uso e rotulagem, contendo as informações necessárias para identificação do produto.

O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO.**PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DE FUNCIONAMENTO**

As Lâminas para serras ósseas funcionam combinadas com produtos médicos ativos, os quais através de um sistema de transmissão mecânica movimentam as lâminas para desempenhar suas funções de cortar e retirar excessos de tecidos ósseos e tecidos duros.

Os produtos médicos ativos não fazem parte deste cadastro e, devem, portanto, ser objeto de registro próprio na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A Microdent[®] recomenda que as Lâminas sejam utilizadas apenas com produtos médicos ativos devidamente registrados na ANVISA.

O acoplamento das Lâminas aos produtos médicos ativos deve seguir as orientações descritas nas instruções de uso do produto médico.

INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

As Lâminas são indicadas para uso exclusivo em procedimentos cirúrgicos, devendo ser manuseadas e utilizadas apenas por profissionais capacitados, sendo obrigação do usuário utilizar e preservar o material em perfeitas condições, protegendo a si, pacientes e terceiros contra eventuais perigos.

As Lâminas foram projetadas para serem utilizadas em conjunto com o equipamento cirúrgico para ortopedia (peça de mão - produto médico ativo que deve ser objeto de registro à parte junto à ANVISA) com a finalidade de auxiliar em procedimentos cirúrgicos das diversas áreas médicas direcionadas a cortar e retirar excessos de ossos e tecidos duros.

O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO. Produto estéril.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As Lâminas cirúrgicas são fabricadas em Aço Inoxidável Martensítico, atendendo aos requisitos especificados pela norma ASTM F899 – “Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments”.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é estéril e o fabricante recomenda o uso único.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

MANUSEIO E MODO DE USO

Tendo em vista que as Lâminas são estéreis, o operador deve seguir os cuidados de manipulação de material estéril ao utilizar o produto.

Para montagem da Lâmina, siga rigorosamente as orientações do fabricante da peça de mão e:

- Retire a Lâmina da embalagem;
- Monte-a no instrumento rotatório (produto médico ativo - objeto de registro à parte na ANVISA);

A escolha da Lâmina (tipo, forma, dimensão, encaixe, dente) é definida pelo profissional habilitado em função do procedimento a ser realizado. Não utilizar Lâminas que tiveram sua embalagem molhada, perfurada ou violada. Produto em condição estéril.

As Lâminas funcionam acopladas a um produto médico ativo, onde o modo de acoplamento e utilização está diretamente ligado ao tipo de produto médico, sendo discriminado nas instruções de uso do produto médico a forma de conexão e o tipo de engate.

As Lâminas devem ser adequadas à técnica cirúrgica aplicada e, cabe ao profissional cirurgião responsável, escolher o tipo de Lâmina e o equipamento a serem utilizados.

As Lâminas devem ser manuseadas por profissionais da saúde com conhecimento específico na utilização de produtos médicos ativos e materiais de uso em saúde, para trabalhos em tecidos ósseos. O fabricante recomenda o uso único das Lâminas.

PRECAUÇÕES, RESTRICÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO;

O produto é esterilizado por ETO (Óxido de etileno). A esterilização possui validade de cinco anos a partir da data de esterilização, se a embalagem estiver inviolada.

Se os componentes ou a embalagem apresentarem algum dano, os mesmos não devem ser utilizados, pois o funcionamento e a esterilidade do material não estão garantidos;

Nunca utilize um dispositivo que apresente superaquecimento;

Não deixe nenhum tipo de ferramenta no paciente ou que ofereça risco de queda durante a cirurgia;

Os instrumentos rotatórios cirúrgicos são instrumentos delicados. A preparação, manutenção incorreta e o uso inadequado podem levar a um desempenho deficiente, perda e até danos ao instrumento;

As Lâminas devem ser utilizadas apenas por profissional devidamente habilitado;

Toda Lâmina deve ser preparada individualmente a fim de evitar transtornos (riscos, danos ao instrumental, ao paciente);

Não usar as Lâminas como alavanca, cunha ou submetidas à sobrecarga;

Não forçar demais a Lâmina e evitar mudanças bruscas de velocidade.

Antes da utilização do material devem-se avaliar as condições da embalagem;

Utilizar óculos de proteção, quando equipamento em funcionamento;

Arqueamento ou trincas nas Lâminas poderão causar sua ruptura, podendo agir como projétil.

Evitar quedas e impactos;

Cargas laterais excessivas podem causar superaquecimento, de modo que seja desconfortável manuseá-las.

Não coloque produtos médicos ou materiais superaquecidos no paciente. Neste caso interrompa a utilização e use-o de forma alternada;

O uso contínuo ou prolongado de uma Lâmina poderá causar desgaste e necrose térmica devido ao aquecimento pela fricção;

Não afiar as Lâminas, isso afetará sua função específica, assim como seu dimensional, acarretando risco à natureza da remoção do tecido ósseo.

O Produto médico ativo (peça de mão) no qual as Lâminas devem ser acopladas são objetos de registro à parte na ANVISA e a Microdent[®] recomenda o uso apenas de equipamentos devidamente regularizados.

A utilização de uma força excessiva, no momento da inserção das Lâminas Microdent[®] na peça de mão (produto médico ativo), poderá fazer com que o produto dobre ou quebre, causando lesões no operador;

O operador deverá manipular as Lâminas Microdent[®] com cuidado, pois estas podem perfurar luvas cirúrgicas;

Todas as vezes que for necessário manipular as Lâminas Microdent[®], use sua haste, que está fixada na peça de mão;

Se a embalagem estiver violada, a Lâmina deverá ser descartada, pois sua esterilidade não está garantida.

A substituição de peças de mão ou da Lâmina deve ser realizada somente depois que o equipamento não estiver mais funcionando e nem superaquecido;

Assegurar-se de que a Lâmina esteja devidamente encaixada e travada antes de acionar o produto médico;

O uso de irrigação durante o procedimento e utilização da Lâmina, reduzirá a possibilidade de necrose térmica;

Contraindicações: Não se aplica;

Efeitos adversos: Não se aplica.

Precauções relacionadas ao descarte das Lâminas:

Recomendamos que o material utilizado ou que apresentem danos, antes do descarte, sejam devidamente inutilizados para uso. Devem ser descartadas como lixo hospitalar potencialmente contaminante, atentar-se a legislação local do país com relação ao descarte de resíduos.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem deve atender às seguintes exigências: estar embalado; armazenado em local seco e longe da umidade e do calor excessivo, isento de contaminação particulada (poeiras e sujidades) e não deve ser estocado junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

Deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada, molhada ou perfurada.

O transporte deve ser realizado em ambientes limpos, secos e frescos, isentos de umidade e calor excessivo e ao abrigo de poeiras e sujidades, de forma a assegurar a integridade do produto e de sua embalagem, evitando danos ou alterações às mesmas. Evitar quedas e impactos.

Transporte e Armazenamento

Temperatura: 10 °C a 55 °C

Umidade relativa: 10 a 70%

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O produto segue em uma embalagem estéril e lacrada.

Caso haja qualquer sinal de violação na embalagem protetora, não utilizar e não esterilizar o produto.

Para qualquer sinal de violação, sinal de embalagem molhada e/ou perfurada, favor providenciar o descarte do produto, conforme legislação local.

Verifique o item **PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS** para evitar danos ao produto, ao usuário e paciente.

RECLAMAÇÕES DO CLIENTE

Efeitos adversos em qualquer produto para a saúde devem ser notificados a Microdent® com a descrição do evento e dos dados de rastreabilidade que permitam a análise da causa do evento. Recomenda-se informar também o número de registro do produto. Estas informações constam nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham a embalagem do produto. Todas as ocorrências notificadas a Microdent® são recebidas pelo Departamento de Tecnovigilância e submetidas à avaliação do Comitê Técnico para investigação. Ao término da investigação, uma carta resposta é elaborada pelo Departamento de Tecnovigilância para informar ao cliente se a reclamação é procedente ou não, e no caso de procedência da reclamação, a carta informa quais providências serão tomadas. Não é esperada a ocorrência de efeitos adversos na utilização desse produto.

ATENÇÃO

Não tente consertar o produto ou enviá-lo a um técnico não credenciado pela Microdent®, pois isto implicará em perda da garantia, além de oferecer riscos de danos ao produto, perda de desempenho ou riscos aos pacientes e usuários.

FABRICANTE

Microdent® Aparelhos Médicos e Odontológicos Ltda.
Rua Paulo de Frontim, 275 – Vila Virginia, CEP 14030-430
Ribeirão Preto – S.P. – Brasil
Fone: +55 (16) 3625 5595
www.microdent.ind.br – microdent@microdent.com.br

Responsável Técnico: Eng. José Marcelo Lima da Silva
CREA|SP: 5069519453

TERMOS DE GARANTIA

1. A garantia se limita à substituição de peças com defeito de fabricação, devidamente constatados pela Assistência Técnica Microdent®.
2. **PERDA DA GARANTIA:** A garantia será nula quando houver danos causados pelo armazenamento inadequado ou sinais de violação, manuseio ou operação incorreta, ou ainda, quando a causa do defeito for provocada por quedas ou batidas.
3. O produto defeituoso deve ser encaminhado somente ao fabricante, Microdent Aparelhos Médicos e Odontológicos LTDA.
4. Despesas de taxas e fretes de peças, serão de responsabilidade exclusiva do comprador (cliente final), mesmo no período de garantia, desde que, o defeito tenha ocorrido por mau uso do produto ou se o comprador não seguir corretamente as instruções do manual.
5. Para solicitação da garantia, é indispensável à apresentação da nota fiscal de compra pelo consumidor final, caso contrário, a garantia extingue-se automaticamente.

ATENÇÃO: Para requerimento de garantia o produto deve ser encaminhado de forma completa, incluindo partes danificadas. Se o produto não for encaminhado completo não será possível fazer a análise, pois não é possível averiguar a causa do dano. Produtos enviados de forma incompleta **NÃO** serão cobertos pela garantia.

Enviar a cópia da Nota Fiscal de compra juntamente com o produto quando requerer a Garantia.